

Joystick DX2 Brugervejledning



Serienummer: _____ - _____ - _____

Leveringsdato: _____ År 20_____

Dette køretøj er udleveret af:

Dato: / /

P9-0xxx-B ver. 1.2.0 - juni 09

Medema Danmark A/S

Langvadbjergvej 3
Snebjerg
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35

Indholdsfortegnelse


| | |
|--|-----------|
| Introduktion | 4 |
| Betegnelser - knapper | 5 |
| Betjening | 5 |
| Tænd/sluk for ur..... | 6 |
| Indstil hastighed | 7 |
| Indstilling af sæde - ryg og benstøtter..... | 8 |
| Tænd/sluk lyset..... | 9 |
| Indstilling af skærmlys..... | 9 |
| Indstilling af skærm-miljø | 10 |
| Indstilling af klokken..... | 11 |
| Fejlkode | 13 |
| Ekstra | 14 |

Introduktion

DX2 er den første i en ny generation af joysticks til styring af elektriske kørestole. Med sin store LCD farveskærm og sin logiske ikonopbyggede menustruktur, leder den brugeren frem til målet.

God fornøjelse.

Betegnelser - knapper

| Dynamic DX2 AJR | |
|---|------------------|
|  | |
| 1 | Start/stop-knap |
| 2 | Blinklys venstre |
| 3 | Blinklys højre |
| 4 | Funktionsvælger |
| 5 | Display |
| 6 | Hastighedsvælger |
| 7 | Tilbehørsvælger |
| 8 | Horn |

Betjening

I toppen af displayet finder man statusbjælken. Batteriindikator vises hele tiden. Uret kan slås til eller fra efter ønske. De øvrige lyser, når den tilhørende funktion er aktiv.

|  | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Batteriindikator Grøn = fuldt opladet Gult = mindst halv fuld Rød = næsten tom - oplad nu! | | | | |
| 2 | Blinklys venstre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner | | | | |
| 3 | Lyset er tændt | | | | |
| 4 | Fejlkode - se afsnit om fejlkoder | | | | |
| 5 | Blinklys højre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner | | | | |
| 6 | Aktuel tid | | | | |

Tænd/sluk for ur



Tryk på pil op/ned eller joystick (pres fremad) indtil ovenstående ikon vises i centrum.




Brug "funktionstasten" til at skifte mellem X og ✓.

Acceptér med et tryk på pil op/ned tasten.


Indstil hastighed

Når man tænder joysticken vises nedenstående billede i displayet. I midten vises den hastighed man har valgt som maks. hastighed. Hastighed vælges ved at trykke på plus/minus tasten. Maks. hastighed er 5, laveste hastighed er 1.

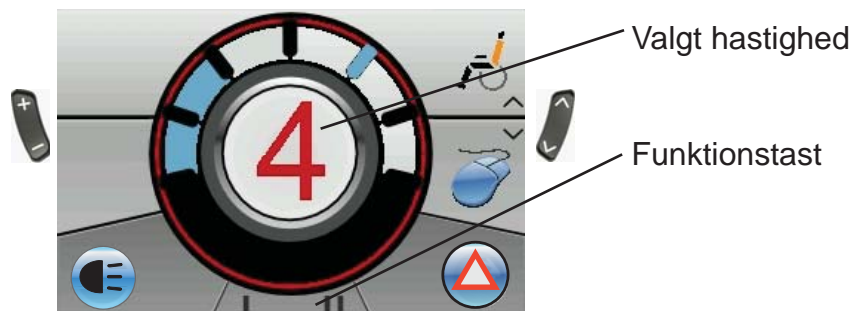

De nederste funktioner vælges med knappen "funktionsvælger".

Indstilling af sæde - ryg og benstøtter

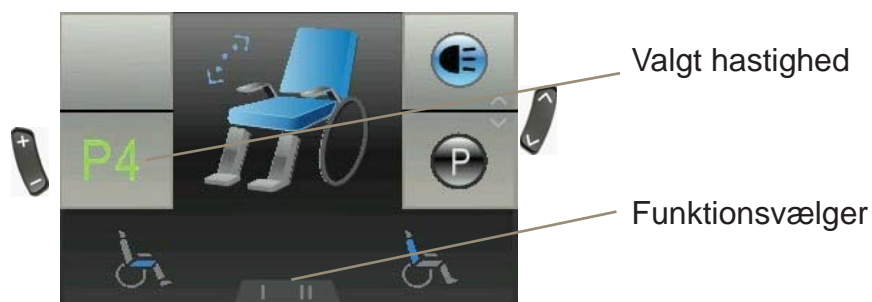


Tryk på pil op/ned indtil billedet viser stolen. Brug "funktionsvælgeren" til at vælge den funktion der ønskes ændret. Brug joysticket til at ændre f.eks. vinklen på sæderyggen.

| Funktion | Ikon |
|-------------------|------|
| Tilt | |
| Rygvinkel | |
| Sædehejs | |
| Venstre benstøtte | |
| Højre benstøtte | |
| Fodstøtter begge | |
| Liggende | |
| Nakkestøtte | |

Kun de tilgængelige indstillinger vil blive vist.

Tænd/sluk lyset

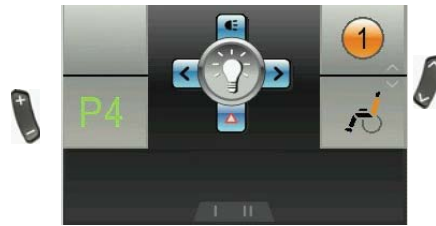

Tryk på pil op/ned indtil ikonet for lys fremkommer i centrum.

Pres herefter joysticket fremad for at tænde lyset. Pres igen fremad for at slukke lyset.

Pres joysticket tilbage for at aktivere katastrofeblink. Og på samme måde slukkes det igen.

Pres joysticket til højre eller venstre for at aktivere blinklyset. Og på samme måde slukkes det igen.

Indstilling af skærmlys




Tryk på pil op/ned til solen fremkommer i centrum. Brug joystick frem for at komme ind i indstillinger. Brug derefter tasten "funktionsvælger" eller joystick højre/venstre til at ændre på lysstyrken.

Joystick frem/tilbage eller pil op/ned accepterer de nye værdier og returnerer til hovedmenuen.

Indstilling af skærm-miljø

Brug pil op/ned indtil "dag/nat" ikonet vises i centrum. Brug joystick fremad for at vælge indstillinger. Nedenstående billede fremkommer.

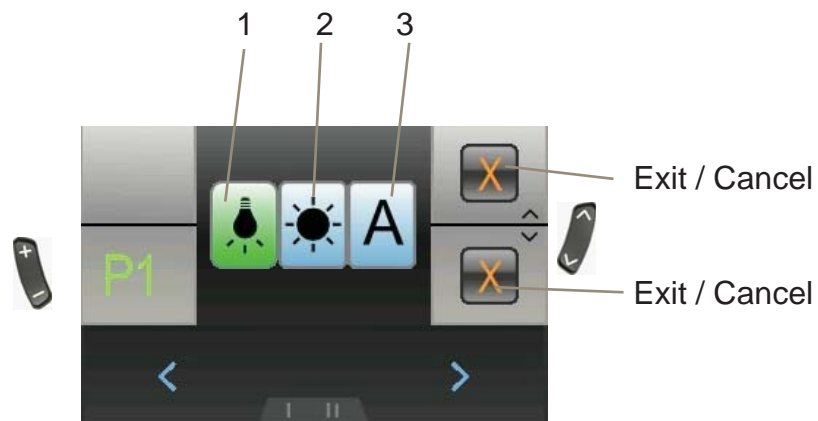

| Opsætning | Resultat |
|----------------|--|
| 1 - Indendørs | Skærmen har sort baggrund |
| 2 - Udendørs | Skærmen har hvid baggrund |
| 3 - Automatisk | Skærmen skifter baggrundsfarve (sort/hvid) afhængig af lyset i omgivelserne. |

Brug "funktionsvælgeren" eller joystick højre/venstre for at vælge indstilling.


Joystick fremad accepterer de nye indstillinger og returnerer til hovedmenuen.

Joystick tilbage eller pil op/ned annullerer de nye indstillinger og går tilbage til hovedmenuen.

Indstilling af klokken



Brug pil op/ned intil uret vises i centrum. Brug joystick fremad for at vælge indstillinger. Nedenstående billede fremkommer.

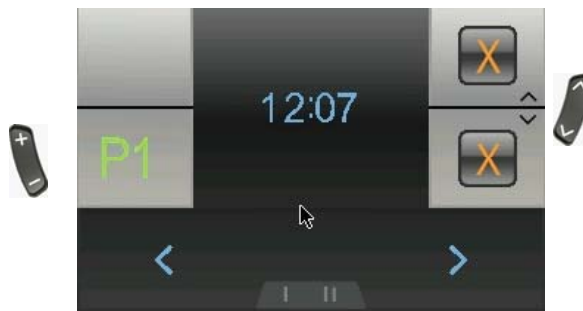

Brug "funktionsvælgeren" eller joystick højre/venstre til at vælge det ciffer der skal ændres.

Joystick fremad tæller op.

Joystick tilbage accepterer ny indstilling, og går tilbage til hovedmenuen.

Pil op/ned annullerer ny indstilling, og går tilbage til hovedmenuen.

Systemlås



For at låse DX systemet



Tryk på tænd/sluk knappen i 4 sek. mens systemet er tændt.
Systemet vil nu lukke ned i låst tilstand.

For at låse DX systemet op



Tryk på tænd/sluk knappen. Systemet vil vise en lås i displayet.



Tryk på hornet 2 gange indenfor 10 sek. Systemet vil starte op på normal vis.

Fejlkode

| Kode | Årsag | Betydning |
|------|---------------------------------|--|
| 1 | DX Modulet | Kan betyde: - fejl i programmering - fejl i ledningsforbindelsen - intern fejl i et modul Sluk for stolen og tænd igen. Hvis ikke det virker, kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut). |
| 2 | DX Accessory | Kan betyde: - kører langsom på grund af hævet sæde (programmering). Ikke en fejl Sænk sædet til nederste position. Hvis ikke det virker, kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut). |
| 3 | Motor 1 / L (M1) | Kan betyde: - løs forbindelse fra motoren til powermodulet - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut). |
| 4 | Motor 2 / L (M2) | Kan betyde: - løs forbindelse fra motoren til powermodulet - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut). |
| 5 | Parkeringsbremse 1 (M1 venstre) | Kan betyde: - løs forbindelse - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut). |
| 6 | Parkeringsbremse 2 (M2 højre) | Kan betyde: - løs forbindelse - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut). |

Ekstra

DX2 joysticket kan ved hjælp af et DX Infra-red Interface Transmitter System, betjene alt elektronisk udstyr, som kan betjenes via fjernbetjening med infra rødt lys. Det være sig TV, radio, pc-mus og andet.

Tilbehør der gør det muligt:

DX-IRIS2 Infra-red Interface Transmitter System

Monteres på stolen, og kan kommunikere med infra rødt udstyr eks. tv, radio eller pc-mus.

DX-MTX Infra-red Mouse Transmitter

Monteres på stolen, og kan kommunikere med en infra rød pc-mus. Det gør det muligt at navigere musen rundt på en pc-skærm ved hjælp af joysticket. Se nedenfor.



Brug pil op/ned til at finde muse ikonet. Så længe musen er blå er den ikke aktiv. Aktiver med joystick fremad. Nu bliver musen grøn



Benyt joysticket til at flytte musen rundt på pc-skærmen.



Brug "funktionsvælgeren" til at klikke med musen. Det fungerer på samme måde som med musen. Man kan lave enkeltklik og dobbeltklik, afhængig af hvad pc'en er sat op til at bruge.

Deaktiver musen igen ved at bruge pil op/ned. Ny funktion kan nu vælges.

Medema Danmark A/S

Langvadbjergvej 3
Snebjerg
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35