

## Quick guide MC Jazzy 1103



# *Mini Grosser*<sup>®</sup>

---

## **Medema Danmark A/S**

Enggårdvej 7  
Snebjerg  
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55  
Telefax: 97 18 88 35

## Indholdsfortegnelse

<b>Quick guide Jazzy 1103 Multi .....</b>	<b>4</b>
<b>Introduktion.....</b>	<b>4</b>
<b>Betegnelser .....</b>	<b>5</b>
<b>Betegnelser Joystick.....</b>	<b>6</b>
<b>Betjening G90T og G90A .....</b>	<b>7</b>
Valg af sædefunktioner .....	8
Opladning .....	9
<b>Sikkerhedskontrol .....</b>	<b>10</b>
<b>Fejlsøgning Dynamic .....</b>	<b>10</b>
<b>Serienummer.....</b>	<b>11</b>
<b>Kørsel med Mini Crosser Jazzy 1103.....</b>	<b>11</b>
11 gode råd til kørsel på Mini Crosser Jazzy: .....	12
Kørsel på offentlig vej: .....	13
Kørsel på trapper/rulletrapper.....	13
<b>Bremser .....</b>	<b>14</b>
Motorbremsning: .....	14
Parkeringsbremse:.....	14
Frikobling: .....	14
<b>Egne notater.....</b>	<b>15</b>

## Quick guide Jazzy 1103 Multi

### Introduktion

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye elkørestol, Mini Crosser Jazzy 1103. De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til såvel indendørs som udendørs brug. Et såkaldt klasse A køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske kørestole.

For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i Brugervejledningen. Vær som ny bruger særlig opmærksom på afsnittet "Kørsel med Mini CrosserJazzy"

#### **Bemærk:**

Denne Quick Guide skal ses som et supplement til Brugervejledningen. Man kan derfor ikke forvente at oplysningerne i Quick Guiden er fyldestgørende.

NB: Der tages forbehold for trykfejl, og ændringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

---

#### **Advarsel!**

Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige hermed.

Køretøjet er beregnet til én person.


Max personvægt 125 kg. Kan specialtilpasses fra fabrikken til en personvægt på 150 kg.

Mini Crosser A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller usikker benyttelse af Mini Crosser Jazzy.

# Mini Grosser®

## Betegnelser

Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring senere i denne vejledning.

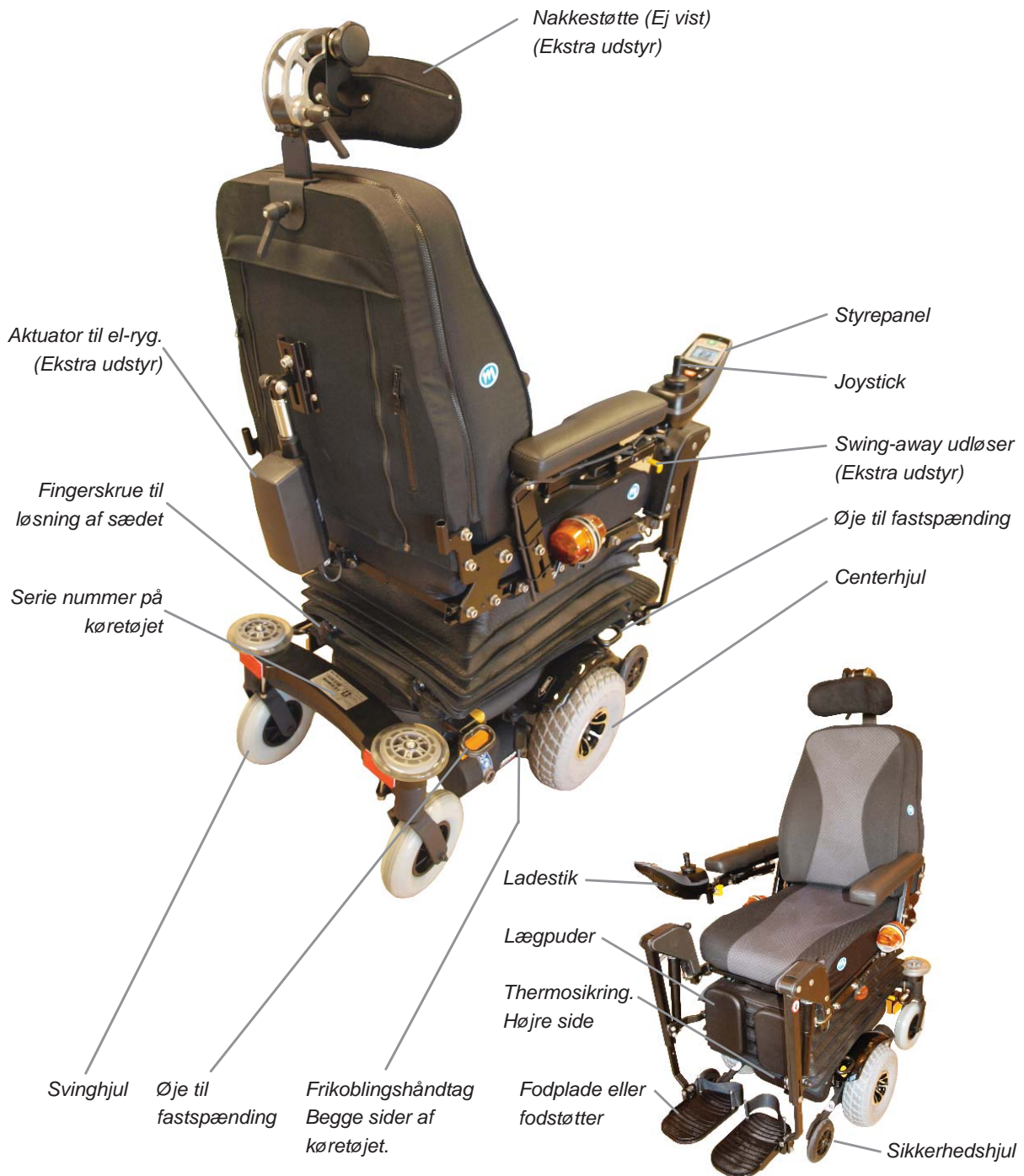



## Betegnelser Joystick

Dynamic G90T		Dynamic G90A	
1A	Start/stop-knap (trykknop)	1	Start/stop-knap
1B	Start/stop-knap (vippekontakt)	2	Display
2	Display	3	Valg af program
3	Valg af program	4	Display for sædefunktioner
4	Display f/sædefunktioner	5	Batteriindikator
5	Batteriindikator	6	Magnetlås
6	Magnetlås	7	Horn
7	Horn	8	Joystick
8	Joystick	9	Sædefunktion / lys, katastrofeblink og blinklys
9	Sædefunktion / lys, katastrofeblink og blinklys	10	Blinklys venstre / lys
10	Valg af program (vippekontakt)	11	Blinklys højre / katastrofeblink

### Bemærk

Batteriindikatoren skal lyse rødt, gult og grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, skal batterierne oplades snarest muligt. Hvis kun rødt lyser permanent eller blinker, skal batterierne oplade straks.

## Betjening G90T og G90A

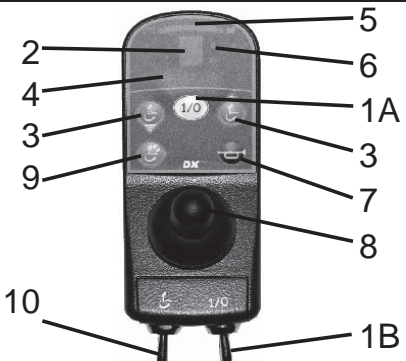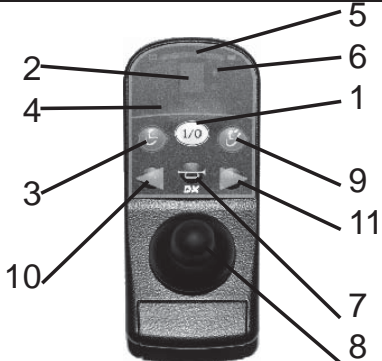




			
Valg af hastighed G90T		Valg af hastighed G90A	
1	For at starte for stolen: Tryk på knappen 1A eller brug vippekontakten 1B Vent til batteriindikatoren har stabiliseret sig (3-5 sekunder)	1	For at starte for stolen: Tryk på knappen 1, og vent til batteriindikatoren har stabiliseret sig (3-5 sekunder)
2	Vælg maks hastighed: Tryk gentagne gange på knap 3 eller vippekontakt 10, så tallene skifter mellem 1, 2, 3, 4 og 5. 1 er laveste hastighed og 5 er højeste. (Kan variere. Nogle stole går kun til 3)	2	Vælg maks hastighed: Tryk gentagne gange på knappen 3, så tallene skifter mellem 1, 2, 3, 4 og 5 på displayet. Vælg tal for ønsket hastighed. 1 er laveste og 5 er højeste hastighed.
Kørsel		Kørsel	
1	Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten.	1	Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten.
2	Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier.	2	Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier.

### Bemærk!

Ved kørsel på skrånende underlag med dårligt vejgreb, f.eks. grus, sne etc., er det vigtigt at bremse blødt op, for at undgå at miste kontrollen over stolen. Blød opbremsning: Før Joystick LANGSOMT til midterstilling.

# Mini Grosser®

## Valg af sædefunktioner

A	B	C	D	E
				
Valg af sædefunktioner G90T		Valg af sædefunktioner G90A		
A	Venstre fodplade	A	Venstre fodplade	
B	Sædevinkel (tilt)	B	Sædevinkel (tilt)	
C	Ryg vinkel	C	Ryg vinkel	
D	Sæde højde	D	Sæde højde	
E	Højre fodplade	E	Højre fodplade	
		Hvis A og E blinker på samme tid, kan begge fodplader betjenes på én gang.		

## Opladning



### Opladning

1	Sæt stikket i styreboksen på stolen
2	Sæt stikket i vægudtaget, eller slå laderen til
3	Kontroller ved hjælp af kontrollamperne på laderen, at opladningen er startet.
4	Når opladningen er færdig, slås laderen fra, eller stikket i vægudtaget trækkes ud, og derefter fjernes ladestikket fra styreboksen.

Det anbefales at batterierne lades op hver nat, hvis stolen har været benyttet. (Yderligere information i Brugervejledningen)

### Bemærk!

Hvis batterierne er beskadigede eller lækker, bør al kontakt med dem undgås for at undgå ætsningsskader.

Kontakt et kvalificeret værksted snarest muligt!



Udskiftede batterier skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for sikker bortskaffelse.

Yderligere information i Brugervejledningen.

## Sikkerhedskontrol

Se Brugervejledningen

## Fejlsøgning Dynamic

	
<b>Fejlsøgning G90T</b>	<b>G90A</b>
Statuslampe blinker med 5 blink pr. interval	Stolen er frikoblet når den startes. Afbryd stolen, og aktiver parkeringsbremsen.
Statuslampe blinker med 7 blink pr. interval	Batterierne trænger til opladning
Statuslampe blinker med 2 blink pr. interval og stolen kører med halv hastighed.	Stolen kan være udstyret med hastighedsbegrænsning i form af halvering af hastigheden ved løftet sæde. Dette er ikke en fejl. Ellers Modulfejl
Stolen kører med halv hastighed, eller stopper helt	Hvis ikke det er på grund af løftet sæde, kan det være en alvorlig fejl. Kontakt kompetent tekniker hurtigst muligt. (HMC eller terapeut)

### Bemærk!

Mobiltelefoner bør ikke bruges i umiddelbar nærhed af kørestolen, på grund af at de danner elektromagnetiske felter, som måske kan påvirke kørestolens elektronik.

Kørestolens egen elektronik danner til en vis grad også elektromagnetiske felter, og kan under uheldige omstændigheder påvirke f.eks. alarmsystemer i butikker.

Dynamics styresystemer er testet og opfylder kravene iht. ISO7176/14 og EN12184

## Serienummer

På alle kørestole er et serienummerskilt med produktionsår, måned, samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan også findes på forsiden af Brugervejledningen.

Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele osv.

---

## Kørsel med Mini Crosser Jazzy 1103

Inden De sætter Dem i, eller forlader køretøjet, skal De checke:

- A. At kørestolen er slukket, og at kørestolen ikke er frikoblet.
- B. At kørestolen og sædet man flytter sig til, står stabilt.
- C. Undgå at støtte med fuld kropsvægt på fodstøtterne. Ellers kan stolen tippe frem.

Under kørsel skal armene være placeret på armlænene, og fødderne på fodstøtterne.

Kabler og ledninger skal være fastmonteret med strips.

Forsøg aldrig at forcere forhøjninger, og kantsten højere end 4 cm. Og da altid ligepå, så for- og baghjul altid bevæger sig i en lige linie.

### **Bemærk!**

Hvis Deres Jazzy / bil er udstyret med docking system fra Dahl Engineering, skal De være opmærksom på at frihøjden ændres til 3 cm.

Læs mere i Brugervejledningen om kørsel på bakker, op- og nedhældning ved kørsel og kørsel på offentlig vej.

## 11 gode råd til kørsel på Mini Crosser Jazzy:

- Sæt farten ned ved kørsel rundt i sving, og reducér også farten ved kørsel ned ad bakke.
- Sæt farten ned ved kørsel på stigninger. Max stigning =  $8^\circ = 14\%$
- Sæt farten ned ved kørsel på skråninger med sidehældning. Max sidehældning =  $8^\circ$
- Undgå kørsel og parkering i regnvejlr
- Undgå parkering på sne og is.
- Parker altid på et plant (fladt) sted.
- Undgå terrænkørsel.
- Undgå at køre på isglatte kørebaner, eller glatte overflader (eks. sne eller nyslået græs)
- Undgå at forcere kantsten højere end 4 cm. Hvis det er en stol med docking system er frihøjden nede på 3 cm.
- Undgå at køre skråt op og ned over kantsten. Riciko for at vælte.
- Må ikke bruges til at trække vogne o.lign.

### Bemærk!

Det er forbudt at køre Mini Crosser Jazzy i beruset tilstand. Det gælder både medicin og alkohol.

## **Kørsel på offentlig vej:**

Når De kører på offentlige veje, fortove, cykelstier, fodgængerovergange, gågader, parkeringspladser, indkøbscentre osv. skal De være meget opmærksom på at tilpasse hastigheden og afstanden til medtrafikanter. Ved 7 km/t. skal De følge de færdselsregler som gælder for cykelister. Det betyder også at De skal køre med lys i lygtetændingstiden. (Ekstra udstyr)

På fortove må hastigheden max. være 6 km/t. Her betragtes man som fodgænger.

## **Bemærk!**

Gå som hovedregel ud fra at andre trafikanter ikke får øje på Dem, når De sidder på Mini Crosser Jazzy'en. Pas derfor meget på, og afvent at vejen er fri for andre trafikanter, før De krydser vejen.

## **Kørsel på trapper/rulletrapper**

Undgå det. Stolen er ikke beregnet til det, og De kan forvolde store skader på Dem selv og andre.

## Bremser

Mini Crosser Jazzy er udstyret med 2 sæt bremser. Motorbremse og parkeringsbremse.

### **Motorbremsning:**

Ved kørsel ned ad bakke bremser Mini Crosser Jazzyens styreenhed, og motoren vil bremse.

### **Parkeringsbremse:**

Når køretøjet står stille, og joystikket ikke berøres, aktiveres automatisk en magnetbremse på hver drivenhed.

### **Bemærk!**

Mini Crosser Jazzy må ALDRIG bremses ved at slukke på 1/0 knappen under kørsel, da magnetbremsen herved slår til med en voldsom opbremsning med vælterisiko til følge.

### **Frikobling:**

Mini Crosser Jazzy er udstyret med 2 frikoblingshåndtag. En på hver side af køretøjet. Frikobel altid på begge sider.

### **Advarsel!**

Når kørestolen er friboblet er bremsesystemet sat ud af drift. Frikobling må ALDRIG ske på skrånende terræn



*Normal position for kørsel - skubbet ind.*



*Position for frikobling - skubbet ud.*

# *Mini Grosser*<sup>®</sup>

---

Egne notater

# *Mini Grosser*<sup>®</sup>

---

## **Medema Danmark A/S**

Enggårdvej 7  
Snebjerg  
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55  
Telefax: 97 18 88 35