

Quick guide

Jazzy 1121



Medema Danmark A/S

Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35

Indholdsfortegnelse

Quick guide Jazzy 1121	4
Introduktion.....	4
Betegnelser	5
Betegnelser joystick.....	6
Betjening G90T og G90A	7
Valg af sædefunktioner.....	8
Opladning	9
Sikkerhedskontrol	10
Fejlsøgning Dynamic	10
Serienummer.....	11
Kørsel med Jazzy 1121.....	11
11 gode råd til kørsel på Jazzy:.....	12
Kørsel på offentlig vej:.....	13
Kørsel på trapper/rulletrapper	13
Bremser	14
Motorbremsning:	14
Parkeringsbremse:	14
Frikobling:.....	14
Egne notater.....	16
Internationale adresser	17

Quick guide Jazzy 1121

Introduktion

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye elkørestol, Jazzy 1121. De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet til såvel indendørs som udendørs brug. Et såkaldt klasse B køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske kørestole.

For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i Brugervejledningen. Vær som ny bruger særlig opmærksom på afsnittet Kørsel med Jazzy 1121.

Bemærk:

Denne Quick Guide skal ses som et supplement til Brugervejledningen. Man kan derfor ikke forvente, at oplysningerne i Quick Guiden er fyldestgørende.

NB: Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

Advarsel!

Køretøjet må ikke lånes ud til personer, som ikke er fortrolige hermed.


Køretøjet er beregnet til én person.

Maks. personvægt 150 kg. Kan specialtilpasses fra fabrikken til en personvægt på 180 kg.



Mini Crosser A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller u hensigtsmæssig benyttelse af Jazzy 1121.

Betegnelser

Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring senere i denne vejledning.

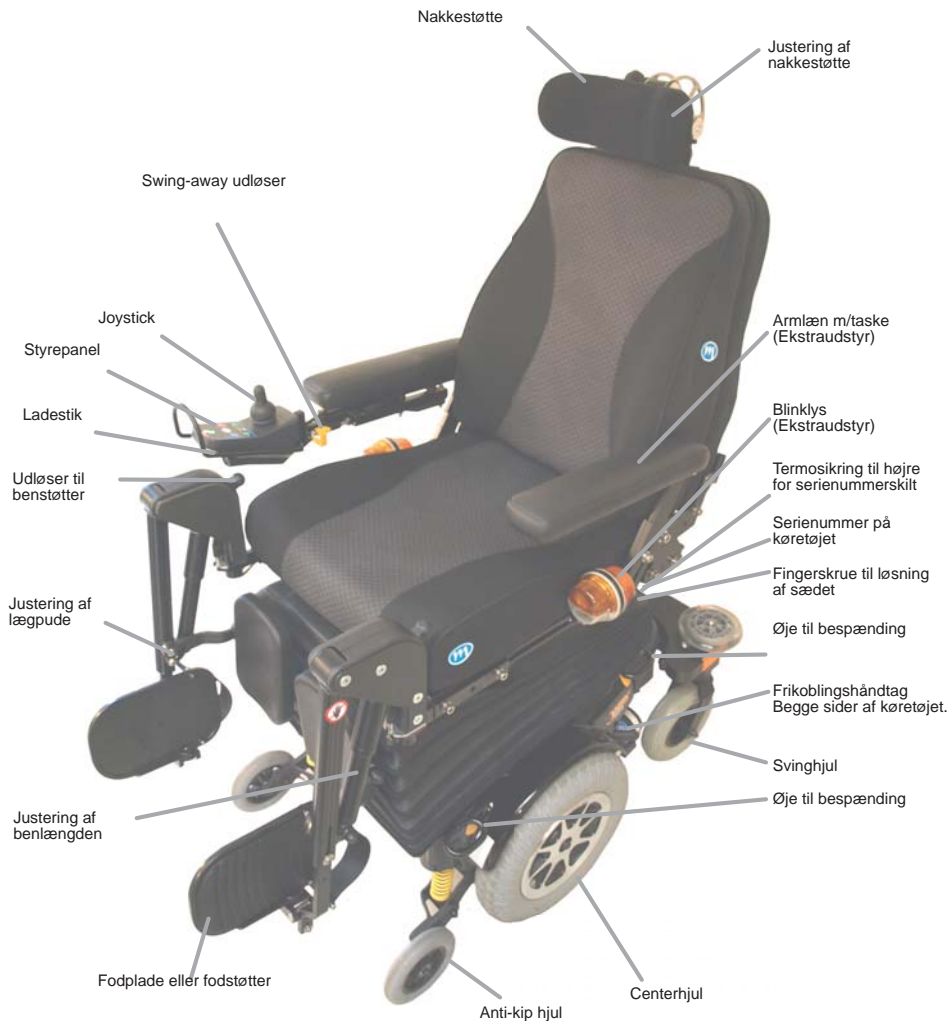



Betegnelser joystick

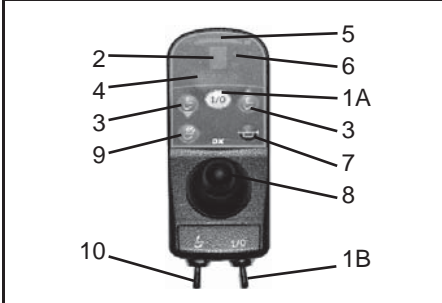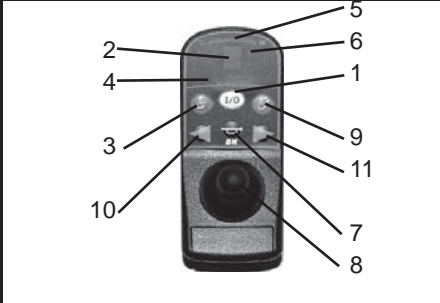			
Dynamic G90T		Dynamic G90A	
1A	Start/stop-knap (trykknop)	1	Start/stop-knap
1B	Start/stop-knap (vippekontakt)	2	Display
2	Display	3	Valg af program
3	Gear ned / op	4	Display for sædefunktioner
4	Display f/sædefunktioner	5	Batteriindikator
5	Batteriindikator	6	Magnetlås
6	Magnetlås	7	Horn
7	Horn	8	Joystick
8	Joystick	9	Sædefunktion / lys, katastrofeblink og blinklys
9	Sædefunktion / lys, katastrofeblink og blinklys	10	Blinklys venstre / lys
10	Valg af sædefunktion (vippekontakt)	11	Blinklys højre / katastrofeblink

Bemærk:

Batteriindikatoren skal lyse rødt, gult og grønt. Hvis kun rødt og gult lyser, skal batterierne oplades snarest muligt. Hvis kun rødt lyser permanent eller blinker, skal batterierne oplades straks.



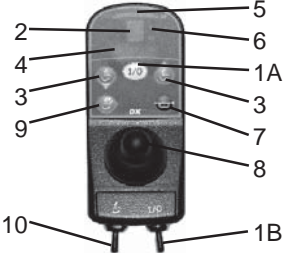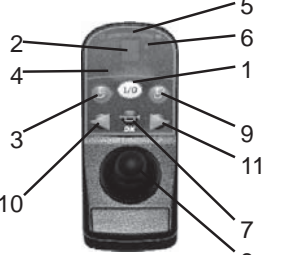


Betjening G90T og G90A

	
<h3>Valg af hastighed G90T</h3>	<h3>Valg af hastighed G90A</h3>
<p>1 For at tænde for stolen: Tryk på knappen 1A eller brug vippekontakten 1B Vent, til batteriindikatoren har stabiliseret sig (3-5 sekunder)</p>	<p>1 For at tænde for stolen: Tryk på knappen 1 og vent, til batteriindikatoren har stabiliseret sig (3-5 sekunder)</p>
<p>2 Vælg maks hastighed: Tryk gentagne gange på knap 3 eller vippekontakt 10, så tallene skifter mellem 1, 2, 3, 4 og 5. 1 er laveste hastighed og 5 er højeste. (Kan variere. Nogle stole går kun til 3)</p>	<p>2 Vælg maks hastighed: Tryk gentagne gange på knappen 3, så tallene skifter mellem 1, 2, 3, 4 og 5 på displayet. Vælg tal for ønsket hastighed. 1 er laveste og 5 er højeste hastighed.</p>
<h3>Kørsel</h3>	<h3>Kørsel</h3>
<p>1 Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten.</p>	<p>1 Begynd at køre ved at føre joysticken i den retning, du ønsker at køre. Hastigheden reguleres med udslaget på joysticken. For at bremse føres joysticken tilbage til udgangsstillingen i midten.</p>
<p>2 Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier.</p>	<p>2 Det er vigtigt at kontrollere batteriindikatoren med jævne mellemrum for at undgå, at stolen går i stå på grund af flade batterier.</p>

Bemærk:


Ved kørsel på skrånende underlag med dårligt vejgreb, f.eks. grus, sne etc., er det vigtigt at bremse blødt op for at undgå at miste kontrollen over stolen. Blød opbremsning: Før joystick LANGSOMT til midterstilling.

Valg af sædefunktioner

A	B	C	D	E
				
Valg af sædefunktioner G90T		Valg af sædefunktioner G90A		
A	Venstre fodplade	A	Venstre fodplade	
B	Sædevinkel (tilt)	B	Sædevinkel (tilt)	
C	Rygvinkel	C	Rygvinkel	
D	Sædehøjde	D	Sædehøjde	
E	Højre fodplade	E	Højre fodplade	
		Hvis A og E blinker på samme tid, kan begge fodplader betjenes på én gang.		

Vælg ikonet for det, du vil justere, og justér med joysticken.

Opladning

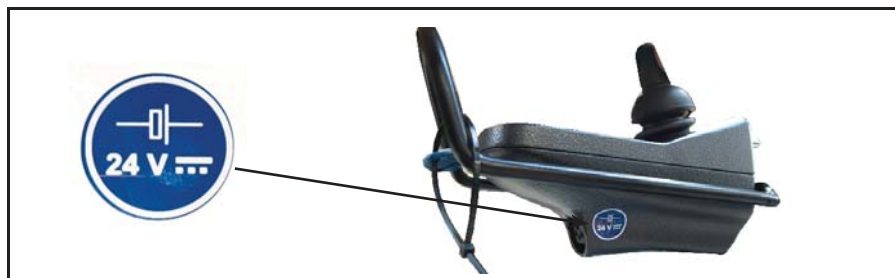

Opladning

1	Sæt stikket i styreboksen på stolen
2	Sæt stikket i vægudtaget eller slå laderen til
3	Kontroller ved hjælp af kontrollamperne på laderen, at opladningen er startet.
4	Når opladningen er færdig, slås laderen fra, eller stikket i vægudtaget trækkes ud, og derefter fjernes ladestikket fra styreboksen.

Det anbefales, at batterierne lades op hver nat, hvis stolen har været benyttet. (Yderligere information i Brugervejledningen)

Bemærk:

Hvis batterierne er beskadigede eller lækker, bør al kontakt med dem undgås for at undgå ætsningsskader.

Kontakt et kvalificeret værksted snarest muligt!

Udskiftede batterier skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for sikker bortskaffelse.

Yderligere information i Brugervejledningen.

Sikkerhedskontrol

Se Brugervejledningen

Fejlsøgning Dynamic

	
Fejlsøgning G90T	G90A
Statuslampe blinker med 2 blink pr. interval, og stolen kører med halv hastighed.	Stolen kan være udstyret med hastighedsbegrænsning i form af halvering af hastigheden ved løftet sæde. Dette er ikke en fejl.
Statuslampe blinker med 7 blink pr. interval	Batterierne trænger til opladning
Stolen kører med halv hastighed eller stopper helt	Hvis ikke det er på grund af løftet sæde, kan det være en alvorlig fejl. Kontakt kompetent tekniker hurtigst muligt (HMC eller terapeut).

Bemærk:

Mobiltelefoner bør ikke bruges i umiddelbar nærhed af kørestolen på grund af, at de danner elektromagnetiske felter, som måske kan påvirke kørestolens elektronik.

Kørestolens egen elektronik danner til en vis grad også elektromagnetiske felter og kan under uheldige omstændigheder påvirke f.eks. alarmsystemer i butikker.

Dynamics styresystemer er testet og opfylder kravene iht. ISO7176/14 og EN12184

Serienummer

På alle kørestole er der et serienummerskilt med produktionsår, måned, samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan også findes på forsiden af Brugervejledningen.

Opgiv venligst serienummeret ved henvendelse om service, reservedele osv.

Kørsel med Jazzy 1121

Inden De sætter Dem i, eller forlader køretøjet, skal De tjekke:

- A. At kørestolen er slukket, og at kørestolen ikke er frikoblet.
- B. At kørestolen og sædet, som man flytter sig til, står stabilt.
- C. Undgå at støtte med fuld kropsvægt på fodstøtterne. Ellers kan stolen tippe frem.

Under kørsel skal armene være placeret på armlænene og fødderne på fodstøtterne.

Kabler og ledninger skal være fastmonteret med strips.

Forsøg aldrig at forcere forhøjninger og kantsten højere end 7 cm, og da altid lige på, så for- og baghjul altid bevæger sig i en lige linie.

Bemærk!

Hvis Deres Jazzy / bil er udstyret med docking system fra Dahl Engineering, skal De være opmærksom på, at frihøjden ændres til 5,5 cm.

Læs mere i Brugervejledningen om kørsel på bakker, op- og nedadgående vej ved kørsel og kørsel på offentlig vej.

11 gode råd til kørsel på Jazzy:

- Sæt farten ned ved kørsel rundt i sving og reducér også farten ved kørsel ned ad bakke.
- Sæt farten ned ved kørsel på stigninger. Maks. stigning = $10^\circ = 17\%$
- Sæt farten ned ved kørsel på skråninger med sidehældning. Maks. sidehældning = 10°
- Undgå kørsel og parkering i regnvej
- Undgå parkering på sne og is.
- Parker altid på et plant (fladt) sted.
- Undgå terrænkørsel.
- Undgå at køre på isglatte kørebaner eller glatte overflader (eks. sne eller nyslået græs)
- Undgå at forcere kantsten højere end 7 cm. Hvis det er en stol med docking-system er frihøjden nede på 5,5 cm.
- Undgå at køre skråt op og ned over kantsten. Risiko for at vælte.
- Må ikke bruges til at trække vogne o.l.

Bemærk:

Det er forbudt at køre Jazzy i påvirket tilstand. Det gælder både medicin og alkohol.

Kørsel på offentlig vej:

Når De kører på offentlige veje, fortove, cykelstier, fodgængerovergange, gågader, parkeringspladser, indkøbscentre osv., skal De være meget opmærksom på at tilpasse hastigheden og afstanden til medtrafikanter. Ved 7 km/t skal De følge de færdselsregler, som gælder for cyklister. Det betyder også, at De skal køre med lys i lygtetændingstiden. (Ekstraudstyr)

På fortove må hastigheden maks. være 6 km/t. Her betragtes man som fodgænger.

Bemærk:

Gå som hovedregel ud fra, at andre trafikanter ikke får øje på Dem, når De sidder på Jazzy'en. Pas derfor meget på og afvent, at vejen er fri for andre trafikanter, før De krydser vejen.

Kørsel på trapper/rulletrapper

Stolen er ikke beregnet til det, og De kan forvolde store skader på Dem selv og andre.

Bremser

Jazzy'en er udstyret med 2 sæt bremser: motorbremse og parkeringsbremse.

Motorbremsning:

Ved kørsel ned ad bakke bremser Jazzy'ens styreenhed, og motoren vil bremse.

Parkeringsbremse:

Når køretøjet står stille og joystikken ikke berøres, aktiveres automatisk en magnetbremse på hver drivenhed.

Bemærk:


Jazzy må ALDRIG bremses ved at slukke på 1/0 knappen under kørsel, da magnetbremsen herved slår til med en voldsom opbremsning med vælterisiko til følge.

Frikobling:


Jazzy er udstyret med 2 frikoblingshåndtag, et på hver side af køretøjet. Fortag ALTID frikobling på begge sider.

Advarsel!

Når kørestolen er frikoblet, er bremsesystemet sat ud af drift. Frikobling må ALDRIG ske på skrånende terræn

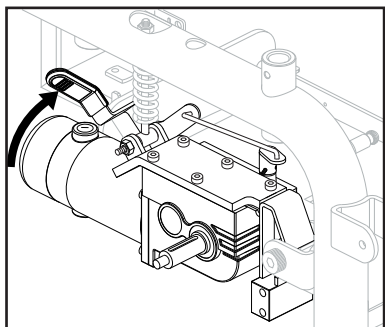

Normal position for kørsel - skubbet op

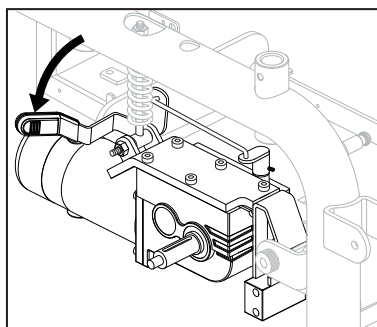

Position for frikobling - skubbet ned

Egne notater

Internationale adresser

Australien / New Zealand

Pride Mobility Products
21 Healey Road
Dandenong 3175 Victoria
Australien
Tlf: +61 3 9706-4611
Fax: +61 3 9706-4622
Email: prideaustralia@pride-mobility.com.au
Internet: www.pridemobility.com/international/Australia/australia.asp

BelgienMobile

Blankenbergsesteenweg 14
B-8000 Brugge
Tlf: +32 (0)50 31 79 19
Fax: +32 (0)50 31 10 26
Email: info@mobilescooter.be
Internet: www.mobilescooter.be

Danmark

Hovedkontor/Jylland:

Medema Danmark A/S
Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning
Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35
E-mail: info@medema.com
Hjemmeside: www.medema.dk

Danmark

Sjælland:

Medema Danmark A/S
Adalen 9
4600 Køge
Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 56 64 33 88
E-mail: info@medema.com

Danmark

Fyn:

Medema Danmark A/S
Sivlandvænget 6
5260 Odense S
Telefon: 70 10 17 55
E-mail: info@medema.com

England

ACL Mobility
65 whitchurch lane.
Bishopsworth,
Bristol BS13 7 TE
Tel: +(44) 0800-1699588
Internet: www.aclmobility.com

Finland

Inva-apuväline OY
Kumpulantie 1
FI-00520 Helsinki
Tlf: +358 (09) 229 540
Fax: +358 (09) 2295 4404
Email: info@inva-apuväline.fi
Internet: www.inva-apuväline.fi

Frankrig

ARSANDIE
25, Rue de Froidvent
F-60290 MONCHY SAINT ELOI
Tlf: +33 03 44 60 99 10
Fax: +33 03 55 03 55 10
Email: contact@arsandie.com
Internet: <http://www.arsandie.com/>

Holland

Richard van Seenus Nederland B.V.
Postbus 1425, 1300 BK Almere
Bolderweg 6, 1332 AT Almere
Tlf: +31 (0) 36 53 20 450
Fax: +31 (0) 36 53 21 308
Email: info@vanseenus.nl
Internet: www.vanseenus.nl

Island

Icepharma HF
Lynghálsi 13
IS-110 Reykjavik
Island
Tlf: +354 540 8000
Fax: +354 540 8001
Email: icepharma@icepharma.is
Internet: www.icepharma.is

Norge

Medema gruppen AS
Postbox 133
N-1483 Skytta
Tlf: +47 67 06 49 00
Fax: +47 67 06 49 90
Email: firmapost@medema.no
Internet: www.medema.no

Schweiz

Degonda Rehab SA
Industriestrasse 12
CH-3661 Uetendorf
Tlf: +41 033 345 83 00
Fax: +41 033 345 83 01
E-Mail: info@turbo-twist.ch
Internet: www.turbo-twist.ch

Spanien

Assessorament I Mobilitat. S.L.
Marqués de Monistrol, Local 3 (esq. C./ Girona, 29-31)
08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona.
Teléfono +34 93 666 55 23
Fax: +34 93 666 88 85
E-mail: info@assessoramentimobilitat.com
Internet: http://www.assessoramentimobilitat.com

Sverige

Minicrosser AB
Bultgatan 28
S-442 40 Kungälv
Tel: (+46) 303 245 200
Fax: (+46) 303 245 228
Email: info@minicrosser.se
Internet: www.minicrosser.se

Tyskland

Baden Württemberg

Elofahrr Palm
Finkenweg 27
D-76571 Gaggenau
Tlf: +49 07225 918 831
Fax: +49 07225 988 070
Mobil: +49 0171 314 7726
Email: uwepalm@web.de

Tyskland

Bayern

Sanitätshaus Gebhardt
Nikolaistrasse 10
83022 Rosenheim
Tel (+49) 0 80 31 15 46 6
Fax (+49) 0 80 31 34 76 2
E-mail: info@ot-gebhardt.de
Internet: www.sanitaetshaus-gebhardt.de/

Tyskland

Berlin, Mecklenburg- Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Sachsen

Conze Elektro-Mobile
Britzer Damm 12
D-12347 Berlin
Tlf: +49 030 6789 7969
Fax: +49 030 6789 7968
Email: info@elektro-mobile.de
Internet: www.elektro-mobile.de

Tyskland

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Unterfranken

Beromobil GmbH
Elektromobile Treppenlifte
Draiser Weg 16
D-65346 Eltville-Erbach
Tlf: +49 06123 - 60 57 22
Fax: +49 06123 - 60 57 23
Email: info@beromobil.de
Internet: www.beromobil.de

Tyskland

Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein Westfalen

Wiggers GmbH - Reha / Rollstuhl Werkstatt
Gerhard Stalling Strasse 47 B
D-26135 Oldenburg
Tlf: (+49) 0441 36 111 302
Fax: (+49) 0441 36 111 309
Email: wiggers.gmbh@ewetel.net
Internet: www.minicrosser.info; www.ot-wiggers.de

USA / Canada

Pride Mobility Products Corp.
182 Susquehanna Ave.
Exeter, Pa. 18643
USA
Tlf: +1 800 800 8586
Fax: +1 800 800 1636
Internet: www.pridemobility.com

Østrig

Sanitätshaus Gebhardt
Nikolaistrasse 10
83022 Rosenheim
Tel (+49) 0 80 31 15 46 6
Fax (+49) 0 80 31 34 76 2
Internet: www.sanitaetshaus-gebhardt.de/

Mini Grosser[®]

Medema Danmark A/S

Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35