

BRUGERVEJLEDNING

Mini Crosser Jazzy 1120

Mini Crosser Jazzy 1170

SERIENUMMER: ____ - _____

LEVERINGSDATO: ____ / ____ 200



Mini Crosser Jazzy 1170

Mini Crosser Jazzy 1120



Denne brugervejledning har varenummer: P9-0012

Dette køretøj er udleveret af:

Dato / - 200

Indholdsfortegnelse

Afsnit 1	Introduktion	3	
Afsnit 2	Sikkerhedsforskrifter	4	
Afsnit 3	Betjeningsgreb	7	
Afsnit 3.1	Styrepanel	8	
Afsnit 4	Bremser	12	
Afsnit 5	Kørsel med Mini Crosser-Jazzy:	13	
Afsnit 5.1	Sådan kommer De godt i gang	13	
Afsnit 5.2	Særlige forhold omkring Mini Crosser Jazzy.	15	
Afsnit 6	Vedligeholdelse	16	
Afsnit 6.1	Dæk- / Lufttryk	16	
Afsnit 6.2	Sikringer	17	
Afsnit 6.3	Batterier og opladning	18	
Afsnit 6.4	Opbevaring	20	
Afsnit 6.5	Pleje	21	
Afsnit 6.6	Frikobling & Bugsering:	22	
Afsnit 7	Færdselsregler	23	
Afsnit 8	Transport i bil	23	
Afsnit 9	Transport i fly	23	
Afsnit 10	Forsikring	23	
Afsnit 11	Fejlfinding	24	
Afsnit 12	Garanti	26	
Afsnit 13	Tekniske data	26	
Afsnit 14	Introduktion til sæder	28	
Afsnit 14.1	Instruktion / Ergo Standard sæde	28	
Afsnit 14.1	Instruktion / Ergo Standard sæde	fortsat	29
Afsnit 14.2	Instruktion / Ergo Lux sæde	29	
Afsnit 15	Introduktion til fodplade og fodstøtter	31	
Afsnit 15.1	Indstilling af fodplade	31	
Afsnit 15.2	Indstilling af fodstøtter	32	



I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE NR. 734 AF 10. AUGUST 1994 OM MEDICINSK UD-
STYR

Afsnit 1 Introduktion

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye elkørestol Mini Crosser Jazzy.

For at få fuld glæde af dette køretøj – vil vi bede Dem om, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning. Brugsanvisningen er lavet for at gøre det trygt og sikkert at benytte Mini Crosser Jazzy.

Mini Crosser A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller usikker benyttelse af Mini Crosser Jazzy.

Denne instruktion vil forklare nogle betjeningsmæssige og anvendelsesmæssige enkeltheder. Mini Crosser Jazzy 1120 & 1170 er en elkørestol som er konstrueret til brug inden- og udendørs.

Vi råder over et stort udvalg i tilbehørsdele til Mini Crosser Jazzy, som kan monteres for at gøre hverdagen lettere for Dem. De er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information om special tilbehør og tilpasninger.

Har De yderligere spørgsmål til brugen af Mini Crosser Jazzy eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte os på

Producent

Mini Crosser A/S
Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning
Tlf. 70 10 20 54

www.minicrosser.dk

Forhandler

Medema Danmark A/S
Langvadbjergvej 3
Snebjerg
7400 Herning
Tlf. 70 10 17 55

www.medema.dk

Afsnit 2 Sikkerhedsforskrifter

Mini Crosser Jazzy er et moderne hjælpemiddel, som er udviklet specielt til at hjælpe Dem til at få den størst mulige bevægelsesfrihed.

Før De tager Mini Crosser Jazzy'en i brug, skal alle forudsigelige daglige situationer afprøves: Op- /nedkørsler, kørsel i ujævnt terræn og kørsel i skrånende terræn. Disse ting bør øves med terapeut eller anden hjælper.

Overskrid aldrig specifikationerne i denne brugsanvisning. Hvis De selv har forsøgt at ændre ved køretøjet, vil garantien fra fabrikens side bortfalde på alle dele. Endvidere fratæger vi os ethvert ansvar fra person- og tingskader.

Nedenfor beskrives, hvordan De skal håndtere de forskellige dagligdags situationer.

Når De forlader eller stiger på køretøjet

Mini Crosser Jazzy'en **skal** altid være slukket, når De enten sætter Dem i eller forlader køretøjet.

Herved kan man ikke komme til at aktivere joysticket, hvorved der kan ske uheld.

Vi anbefaler, at man øver sig, enten med en personlig hjælper eller terapeut med ind- og udstigning af Mini Crosser Jazzy'en.

Inden man enten sætter sig eller forlader kørestolen, skal man:

- A. Checke, at strømmen er slået fra.
- B. Undgå at støtte på fodstøtterne med fuld kropsvægt.

Hvis denne advarsel ikke følges, kan Mini Crosser Jazzy'en tippe frem, og De kan falde ud med personskader til følge.

Armene og benene skal være placeret således

Under kørsel med Mini Crosser Jazzy skal Deres arme altid være på armlænene, og Deres fødder skal være placeret på fodstøtterne. Hermed undgår De stød på kropsdele, mens der køres.

Max. belastning

Mini Crosser Jazzy er udformet til transport af 1 person og kun 1 person. Man må aldrig have "passagerer" med på køretøjet, da dette vil kunne medføre, at køretøjet vælter.


Mini Crosser Jazzy 1120 & 1170 kan klare en personbelastning på 150 kg. Overskrides denne vægtgrænse, kan det føre til alvorlige person- og materielle skader.

Kabler og ledninger.

Vær altid opmærksom på kabler og ledninger. Fra f.eks. Joysticket, disse skal altid være strippet op da de ellers kan blive beskadiget.

Forcering af niveauforskelle

Ved forcering af niveauforskelle bl.a. forhøjninger og kantsten, samt ved kørsel i bakket og ujævnt terræn, skal De altid køre ligeud. Herved bevæger for- og baghjul sig altid i en lige linie, så muligheden for overstyring bliver formindsket. Forsøg aldrig at forcere forhøjninger og kantsten der er højere end 10 cm. Dog 7 cm. for Mini Crosser Jazzy 1120 (Figur 1)

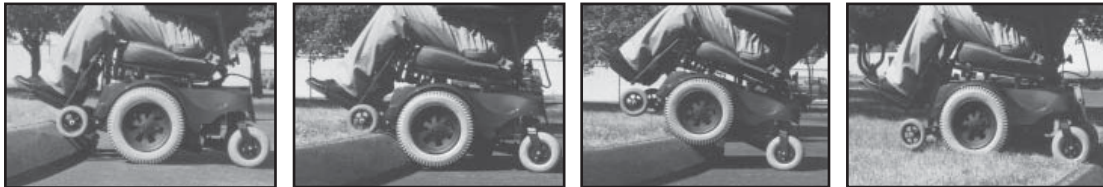

Figur 1

Kørsel på bakker

Ved kørsel på bakker skal man forsøge at holde kørestolen i bevægelse hele tiden. Hvis det bliver nødvendigt at stoppe, så start langsomt igen. Når De skal køre ned ad bakke, skal det gøres i det langsomste tempo. Kører Mini Crosser Jazzy'en hurtigere, end De ønsker, stoppes der ved at slippe joysticket helt. Tryk forsigtigt joysticket frem igen og fortsæt forsigtigt resten af vejen ned ad bakken.

Max. side- og op/ned hældning ved kørsel

Kør med lav hastighed og med sædeløft i laveste stilling, når der køres tæt på niveauforskudt plan. Kør aldrig på hældninger over 10° (17 %). Sæt farten ned, når De drejer på skrånende terræn.

Parkering

Parker altid på et plant (fladt) sted – det øger sikkerheden.

Hvor må man ikke benytte køretøjet

Benyt aldrig Mini Crosser Jazzy på isglatte kørebaner eller meget glatte overflader f.eks. sne, eller nyslået vådt græs.

Kørsel på offentlige veje

Når De kører på offentlige veje, fortove, cykelstier, fodgængerovergange, gågader, parkeringspladser, indkøbscentre o.s.v. skal De være meget opmærksom på at tilpasse hastigheden og afstanden til medtrafikanter.

På fortove må hastigheden max. være 6 km/t.

For andre trafikanter er De svær at se, når De sidder på Mini Crosser Jazzy'en. Som tommelfingerregel skal De regne med, at De overhovedet ikke bliver set. Pas derfor meget på og afvent, at vejen er fri for andre trafikanter.

Trapper / Rulletrapper

Kørestole er ikke konstruerede til brug på trapper og rulletrapper. Benyt derfor altid en elevator eller en kørestolslift/rampe. Skulle De forsøge at benytte trapper / rulletrapper, kan De forvolde store skader på Dem selv og andre.

Transport i bil / bus

Mini Crosser Jazzy kan anvendes som sæde under transport i bil eller bus, såfremt kørestolen er forsvarligt fastspændt til bilen / bussen ved hjælp af godkendte firepunktsseler, fastgjort i de dertil forberedte fastspændingspunkter på Mini Crosser Jazzy.

Brugeren skal derudover altid være uafhængigt fastspændt til selve bilen / bussen efter reglerne derom i færdselslovgivningen.

Påvirkning af udefra kommende elektrisk støj

Mini Crosser Jazzy'ens elektronik er beskyttet på bedst mulig måde for udstråling fra køretøjet samt følsomhed for udefra kommende elektrisk støj. Alligevel kan en Mini Crosser Jazzy under visse omstændigheder udløse butiksalarmen. Mobiltelefon bør ikke anvendes under kørsel.

Hvor må man opbevare køretøjet

Opbevar ikke Mini Crosser Jazzy'en under følgende ugunstige forhold: Regn, sne, tåge og temperaturer under frysepunktet.

Herunder menes også at opbevare Mini Crosser Jazzy'en i en bil/varevogn, der er parkeret udendørs.

Opbevares Mini Crosser Jazzy'en under ovennævnte forhold kan det skade elektronikken, og dermed kan brugeren miste kontrollen over køretøjet.

Skulle der alligevel komme fugt til elektronikken, skal De vente med at benytte køretøjet, til det er helt tørt. Sørg for, at Mini Crosser Jazzy'ens omgivelser altid har en temperatur mellem 0° og 30°C.

Medicin contra kørsel med Jazzy'en


Hold Dem orienteret med Deres læge eller apoteket, hvis De tager medicin, som har indflydelse på evnen til at køre motoriserede køretøjer.

Medikamenter kan have indflydelse på Deres reaktionsevne, samt begrænse Deres dømmekraft.

Det er forbudt at køre Mini Crosser Jazzy i beruset tilstand.

Afsnit 3 Betjeningsgreb

Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring senere i instruktionsbogen

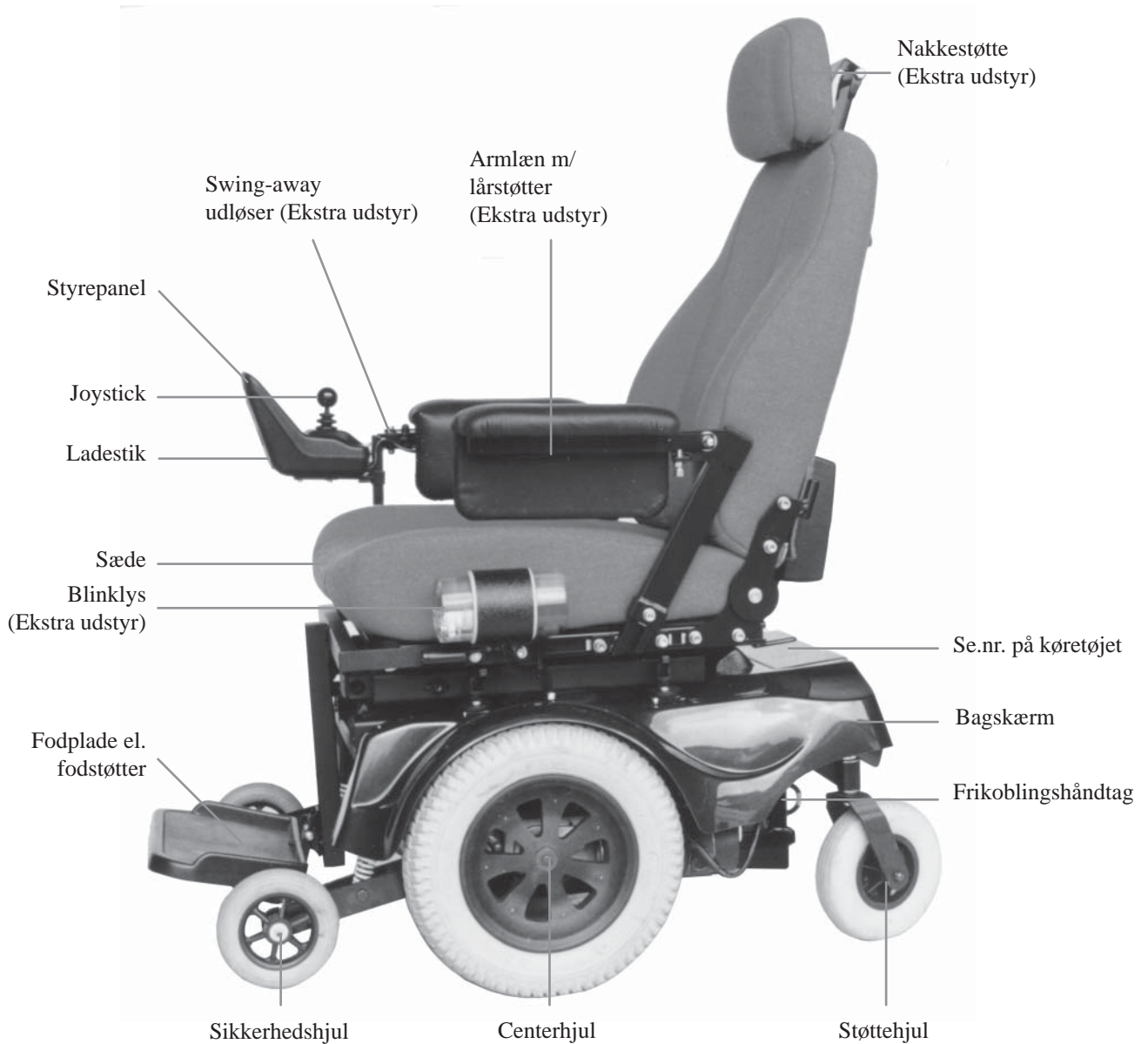

Afsnit 3.1 Styrepanel

Mini Crosser Jazzy kan være udstyret med et swing away joystick (ekstra udstyr)
For at betjene dette trykker man på håndtaget, og joysticket kan skubbes til siden.
(Figur 2 & 2A)



Figur 2 Swing away junior



Figur 2A Swing away voksen

Udløser
håndtag.

Styrepanelet - vist nedenfor - kan monteres i højre eller venstre side efter ønske. Joysticket er udstyret med lystaster og lamper.

Den nedenfor beskrevne Dynamic Dolphin joysticksboks er monteret som standard ved leveringen. Midt på styrepanelet er et betjeningshåndtag, som kaldes joystick. Joysticket kan bevæges i alle retninger, men man skal ikke hive op i, eller trykke på joysticket.

Tryk på den hvide I/O knap for at tænde kørestolen.

Ved at trykke på den hvide I/O knap igen, slukker De for kørestolen. For at kunne betjene joysticket skal De tænde på I/O. Vent herefter 5 sek. fra aktivering af I/O knappen til andre betjeningsknapper tages i brug. Skulle det ske, at De for hurtigt begynder at aktivere andre funktioner vil en lille grøn lampe (indikator lampe, se pkt. 13, side 10) blinke kontinuerligt.

Sluk på I/O knappen og vent 5 sek.. Start igen ved tryk på I/O.

Med joysticket kan De bestemme kørselsretningen og hastigheden. Bøj joysticket i den retning, som De ønsker at køre i, og kørestolen kører i den retning.

Når joysticket bliver flyttet fra midten (neutralstilling), vil det automatisk løsne den elektromagnetiske bremse, og kørestolen sætter sig i bevægelse. Jo mere joysticket bevæges væk fra neutralstilling, jo hurtigere kører stolen.

Slippes joysticket vil det automatisk bevæge sig til neutralstillingen, og kørestolen vil bremse.

Den elektroniske motorbremse vil derpå automatisk slå til og forhindre uønsket bevægelse af kørestolen.



Figur 3 Styrepanel



Figur 4 Valgmuligheder på styrepanel

1. Ladestandviser :

Grøn = fuldt opladet, Gul = halvt opladet, Rød = tom.

2. Sluk / Tænd kontakt

Med denne knap kan man slukke og tænde køretøjet.

3. Blinklys:

Blinklys kan monteres som ekstraudstyr.

4. Horn:

Hornkontakt. Her kan man med lyd advare medtrafikanter.

5. Sædeløft:

Denne tast indkobler funktionen for sædeløft. Trykkes der på sædeløftefunktionen, vil en lille lampe over sædeløftesymbolet tænde. Når joysticket bøjes frem / tilbage, kan sædet hæves eller sænkes op til 21-22 cm. Kørehastighed reduceres med 50%, når sædet hæves fra nederste stilling. Når man trykker på sædeløftknappen igen, slukker den lille lampe, og joysticket kan igen anvendes til sin kørefunktion.

Ved kørsel i skrånende terræn, bør sædet altid være i laveste stilling. Dette ses ved, at indikatorlampen under I/O (pkt. 13) lyser med konstant lys. Når sædet er hævet over bundstilling blinker samme indikatorlampe (pkt. 13) sådan: ”blink blink (pause) blink blink (pause)”. Kør forsigtigt, når lampen blinker på ovenfor beskrevne måde, men kør **aldrig** i skrånende terræn. (Sædeløft er ekstra udstyr.)

6. Lys:

Dette symbol angiver lygte. Her kan man tænde lyset. Ved kørsel udendørs efter mørkets frembrud på vej, skal der anvendes lys som for cykler. (Lygter er ekstra udstyr).

7. Sædetilt:

Tast for sædetilt. Betjening skal foregå som beskrevet under pkt. 5. Sædet kan tiltes 25° bagud og 5° frem. (Sædetilt ekstra udstyr)

8. / 9. Benstøtter:

8. Denne tast anvendes for elektrisk hæve/sænke bevægelse af højre benstøtte. Betjenes som beskrevet under pkt. 5. (Elektriske benstøtter er ekstra udstyr).
9. Tast for venstre benstøtte - elektrisk betjent.

10. Ryglænsindstilling:

Elektrisk ryglænsindstilling aktiveres ved at trykke på denne knap. Ryglænets bevægelse sker i pilens retnings. Betjenes som beskrevet under pkt. 5. (Ryglænsindstilling er ekstra udstyr).

11. Rød advarselstrekant:

Dette symbol angiver katastrofeblink. Her kan man tænde for katastrofeblinket. Dette er ekstraudstyr.

12. Hastighed:

Denne trykknop med symbol for kørestol anvendes til forvalg af maksimal hastighed. Trykkes på denne, skifter forvalget op fra 1 til 2 til 3 o.s.v. op til 5. Trykkes igen, skiftes til 1 igen. I stilling 5 er kørestolen sat til max. hastighed, og i stilling 1 er kørestolen sat til laveste hastighed. Start altid i laveste hastighedstrin.

13. Grøn indikatorlampe:

Ved blink viser denne lampe eventuelle driftsforstyrrelser / programændringer.




Ekstra låsesystem:

Kørestolen har udover start/stop (I/O-knappen) også et ekstra låsesystem til sikring mod, at uberettigede anvender køretøjet. En lille magnetnøgle, som leveres med Mini Crosser Jazzy i en nøglering, kan anvendes til at af- og tilkoble styresystemet. På billedet er styrepanelet vist, og i nederste venstre hjørne er et nøglesymbol. Holdes magnetnøglen hen til dette symbol, vil der lyde et signal, og efter få sekunder kan køretøjet ikke køre. Når man vil køre igen, holdes magnetnøglen igen hen til nøglesymbolet. Det samme akustiske signal høres nu, og ved tryk på starttasten, kan man køre igen. Skulle man tabe magnetnøglen, kan enhver magnet anvendes som nøgle.

Figur 5 Ekstra låsesystem

Skulle man som bruger komme i den situation, at førligheden bliver yderligere nedsat eller er meget reduceret ved anskaffelsen af Mini Crosser Jazzy, er her et lille udpluk af, hvor avanceret vi kan supplere brugen af Mini Crosser Jazzy. Den kan omprogrammes til at kunne betjenes med: Højre/venstre hånd, hoved-, kind-, hage-, finger-, puste/suge-, bord-, fod-, lyspanels- og hjælperstyring.

Alternativt joystick Europa.

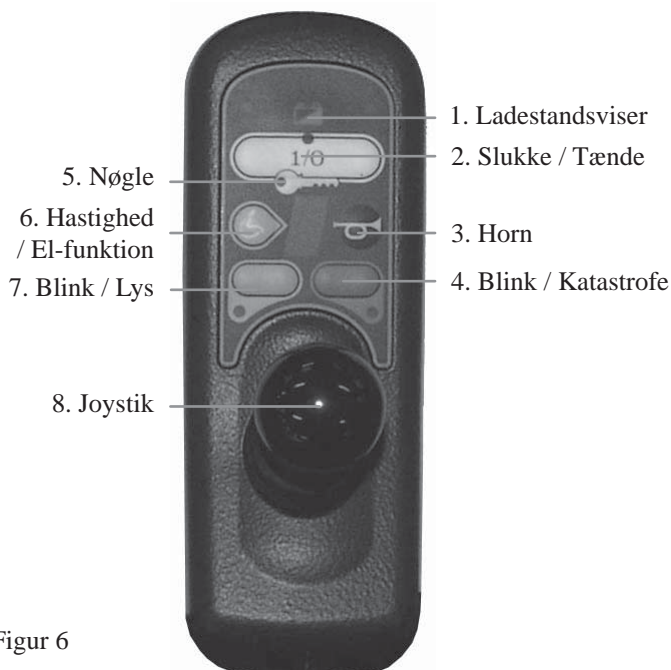

Figur 6

1. Ladestandviser :

Grøn = fuldt opladet, Gul = halvt opladet, Rød = tom.

2. Sluk / Tænd :

Med denne knap kan man slukke og tænde køretøjet.

3. Horn :

Dette symbol angiver horn. Her kan man med lyd advare medtrafikanter.

4. Højre blinklys, katastrofeblink :

Ved hurtigt tryk tændes / slukkes højre blink lys.

Ved langt tryk (min. 2 sek) tændes / slukkes katastrofeblink.

5. Magnetnøgle.

Kørestolen har udover start/stop (I/O - knappen) også et ekstra låsesystem til sikring mod, at uberettigede anvender køretøjet. En lille magnetnøgle, som leveres med Mini Crosser Jazzy i en nøglering kan anvendes til at af- og tilkoble styresystemet.

På billedet er styrepanelet vist, og i midten under I/O kontakten er et nøglesymbol.

Holdes magnetnøglen hen til dette symbol, vil der lyde et signal, og efter få sekunder kan køretøjet ikke køre. Når man vil køre igen, holdes magnetnøglen igen hen til nøglesymbolet. Det samme akustiske signal høres nu, og ved tryk på starttasten kan man køre igen. Skulle man tabe magnetnøglen, kan enhver magnet anvendes som nøgle.

6. Hastighed :

Denne trykknop med symbol for kørestol anvendes til forvalg af maksimal hastighed.

Trykkes på denne, skiftes forvalget op fra 1 til 2 til 3 o.s.v. op til 5. Trykkes atter, skiftes til 1 igen. I stillingen 5 er kørestolen sat til max. hastighed, og i stilling 1 er kørestolen sat til laveste hastighed.

Start altid i laveste hastighedstrin.

7. Venstre blinklys, lys :

Ved hurtigt tryk tændes / slukkes venstre blinklys.

Ved langt tryk (min. 2 sek) tændes / slukkes lyset på køretøjet.

8. Joystik :

Udover at knap 6 anvendes til hastighedsregulering, anvendes den også til de forskellige funktioner, sædet har. Efter hastighedsreguleringerne 1 til 5, fremkommer der nu bogstaver A - B - C - D - E & L. Man skifter imellem bogstaverne ved at bevæge Joystikket til siden (højre/venstre). Når man har fundet det bogstav / funktion, man vil have, presses Joystikket frem / tilbage.

Funktion L, har en dobbelt funktion - Tilbage for at tænde katastrofeblinket, tilbage for at slukke det igen. Frem for at tænde lyset, frem for at slukke det igen.

Funktioner:

- A. Tilt-sæde.
- B. El-ryg.
- C. Fodstøtte.
- D. Fodstøtte.
- E. Sæde-løft.
- L. Katastrofeblink (frem) / lys (tilbage)

Afsnit 4 Bremses

Mini Crosser Jazzy'en er udstyret med 2 sæt bremses: Regenerativ- og parkeringsbremse

Regenerativ bremsning:

Ved kørsel ned ad bakke bremses Mini Crosser Jazzy'ens styreenhed, og motorerne vil virke som generatorer. Herved opnås en hastighedsregulerende afbremsning.

Parkeringsbremsning:

Når køretøjet står stille, og joystikket ikke berøres, aktiveres automatisk en magnetbremse på hver drivenhed. Ved kørsel frigøres først magnetbremsen, hvorpå Mini Crosser Jazzy'en kan køre ved joystik som tidligere beskrevet.

NB!!! Mini Crosser Jazzy må **aldrig** bremses ved at slukke på I/O knappen under kørsel, da magnetbremsen herved slå til med voldsom opbremsning med vælterisiko til følge.

Frikobling:


Mini Crosser Jazzy udstyret med frikoblingshåndtag, som sidder lige under bagskærmen.

Med dette håndtag kan drivenhederne slås fra, og kørestolen kan skubbes manuelt. For at slå motoren til igen, skal håndtaget bringes tilbage til udgangspositionen.

Er håndtaget svært at trække opad, så prøv at rykke kørestolen frem og tilbage et par gange.

BEMÆRK: Det er vigtigt for Dem at huske, at når kørestolen er frikoblet, er bremsesystemet ude af drift.

ADVARSEL: Stil aldrig Mini Crosser Jazzy'en i frikobling, når De holder i bakket terren, i det kørestolen da **ikke** automatisk er bremsset, og at den vil begynde at trille af sig selv. Dette kan føre til alvorlige maskinelle skader og personskader.

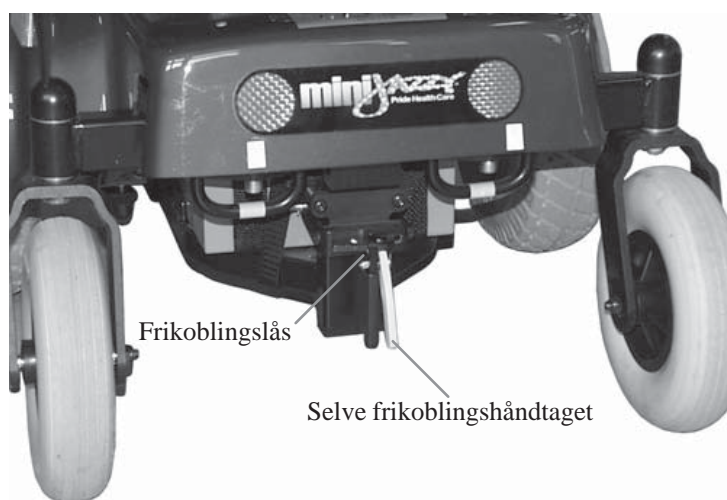

Figur 7 For at frikoble Mini Crosser Jazzy skal frikoblingslåsen trykkes ind, og derefter skal man trække op i selve frikoblingshåndtaget.
For at slå drivenhederne til igen skal håndtaget trækkes ned igen.

Afsnit 5 Kørsel med Mini Crosser-Jazzy

Afsnit 5.1 Sådan kommer De godt i gang:

Kontrollér, at stolen er opladet (se pkt. 1 side 9).

Sluk for stikkontakten, og tag ladestikket ud af stolen. (se side 18-19).

Kontrollér, at stolen er slukket (der må ikke være lys i panelet.)

Check, at kørestolen ikke er frikoblet (se side 23, vedr. frikobling).

De kan nu tage plads i sædet.

Ind- og udstigning sker lettes ved at slå fodstøtter/fodplader og armlæn op. Når De sidder i sædet, indstilles ryglænet og fodstøtter, så De sidder behageligt.

Hvis der forefindes seler, anbefaler vi, at De spænder dem.

Støttebæltet bliver udelukkende brugt til at støtte kroppen. De skal sikre Dem, at bæltet er tilpasset, så det ikke gnaver / klemmer. (Ekstra udstyr)

Tænd for Mini Crosser Jazzy'en ved at trykke på I/O knappen. Vent 2 sek., før De påbegynder at aktivere joysticket eller anden funktion.

Ladestandsviseren lyser og viser, hvor meget batterierne er opladede. Tryk på joysticket i den retning, som De vil køre.

Joystikket:

Med joystikket kan de bestemme kørselsretningen og hastigheden.

For at kunne betjene joystikket samt dens funktioner skal De tænde på I/O knappen.

Bøj joystikket i den retning, som De ønsker at køre, og kørestolen kører i den retning.

Når joystikket bliver flyttet fra neutralstilling, vil det automatisk løsne den elektromagnetiske bremse, og kørestolen sætter sig i bevægelse.

Jo mere De bevæger Joystikket væk fra neutralstillingen, jo hurtigere kører stolen.

Slipper De joystikket, vil det automatisk bevæge sig til neutralstillingen, og kørestolen vil bremse. Den elektroniske motorbremse vil automatisk slå til og forhindre uønsket bevægelse af kørestolen.

Bemærk: De bør dog være opmærksom på, at når De kører baglæns, vil stolen køre med halv hastighed, og kørselsretningen vil være spejlvendt i forhold til joystikkets retning.

Mini Crosser Jazzy er udstyret, så den kan indstilles til den hastighed, som passer nøjagtig til Dem og de omgivelser, som De befinder Dem i.

Bemærk: Vi råder Dem til de første dage, Mini Crosser Jazzy'en bliver benyttet, at vælge det laveste hastighedstrin og derefter langsomt øge hastigheden, så De lære det nye køretøj rigtigt at kende.

Når De slipper joystikket vil stolen omgående standse, og når De fører joystikket til neutralstillingen, vil stolen også standse.

Under kørsel forbruges energi fra batterierne. Når batterierne aflades, vil batterimåleren indikere restkapaciteten. Når kun de røde lamper lyser, er batterierne ved at være afladede, og man bør oplade. Se afsnit 6.3 batterier og opladning.

Hastighedsreduktion ved forhøjet temperatur:

Mini Crosser Jazzy'en vil automatisk reducere hastigheden ved for høj temperatur i elektronikken. Strømkredsløbet registrerer temperaturen på motoren og i styringsenheden. Skulle det ske, at motoren eller styringsenheden bliver overophedet, nedsætter styringsenheden automatisk hastigheden på Mini Crosser-JAZZY'en.

Først når temperaturen er "normal" igen, vil Mini Crosser Jazzy'en igen kunne opnå normal standardhastighed.

7 gode råd til, hvordan man skal køre på Mini Crosser Jazzy:

- Sæt farten ned ved kørsel rundt i sving, og reducér også farten ved kørsel ned ad bakke.
- Mini Crosser Jazzy kan klare en stigning på :

Mini Crosser A/S

Mini Crosser Jazzy 1120 : 10°, 17 %

Mini Crosser Jazzy 1170 : 12°, 21 %

og kun med reduceret hastighed.

- Kør ikke på skråninger med større sidehældning end 10° og da kun med reduceret hastighed.
- Undgå kørsel og parkering i regnvejre og på sne og is.
- Mini Crosser Jazzy er ikke beregnet til terrænkørsel.
- Mini Crosser Jazzy må ikke forcere kantsten højere end:
Mini Crosser Jazzy 1120: 7 cm
Mini Crosser Jazzy 1170: 10 cm
Under kørslen:
Kør ikke skråt op over eller ned over kantsten, da man kan risikere at vælte.
Kan en kantsten ikke umiddelbart forceres, kan man tage kort tilløb.
Man må ikke aktivere joysticket, hvis forhindringen ikke kan forceres.
- Mini Crosser Jazzy er ikke beregnet til at slæbe vogne m.v.

Når De er færdig med at køre:

Tryk I/O på joysticket, og elkørestolen er slukket.

De kan nu forlade kørestolen.

Ladeapparatet bør tilsluttes og tændes.

Afsnit 5.2 Særlige forhold omkring Mini Crosser Jazzy.

Programmering:

Den elektriske styring i Mini Crosser Jazzy'en kan programmeres, så den bedst muligt passer til det givne behov.

Fra fabrikken er køretøjet programmeret i standard opsætning, således at blød acceleration, passende bremsning og følsomhed sikres.

Hvis den leverede programmering ændres, er det under eget ansvar.

For hvert trin, der findes på den viste joysticksboks af Dynamic typen, kan leverandøren ved hjælp af særlig programmeringsapparat indstille værdier for hastighed, afbremsning, acceleration og følsomhed.

Styringen kan derfor programmeres netop til at dække Deres behov.

Transport i bil.

Støttebæltet er ikke en sikkerhedssele eller fastgøringssele.

Enhver bilist, der skal transportere Mini Crosser Jazzy og passager, skal selv erhverve sig

sikkerhedsseler og fastspændingsseler hos autoriseret forhandler og være meget opmærksom på, at disse er anbragt korrekt.

Ved persontransport i bil, skal man følge færdselsloven omkring fastbespæning.

Batterier.

Total afladning af batterierne bør ikke ske, da disses levetid dermed formindskes.

Afsnit 6 Vedligeholdelse

Udover kontrol af dæktryk samt opladning af batterier er der stort set ingen vedligeholdelse for Mini Crosser Jazzy.

Afsnit 6.1 Dæk- / Lufttryk

De forreste sikkerhedshjul er massive. De bagerste støttehjul på Mini Crosser Jazzy 1120 er også massive, men på Mini Crosser Jazzy 1170 er det luftfyldte hjul. De massive hjul skal ikke pumpes.


Drivhjulene har i standard udgaven luftfyldte hjul, men der kan monteres massive hjul. De massive hjul har samme størrelse og udformning, men de er fyldt med en skummasse. Med massive hjul undgår De at punktere.

Dæktrykket på de midterste drivhjul skal kontrolleres mindst 1 gang om måneden. Dæktrykket på alle luftfyldte hjul skal være 2,8 bar. Dette vil forlænge dækkenes levetid og sikre Dem en perfekt funktion af kørestolen.

Skulle De punktere på et af de luftfyldte hjul, eller hvis et dæk er slidt så meget, at de trænger til at blive udskiftet, skal De følge anvisningerne herunder:

Dæk og slanger kan købes ved den autoriserede forhandler, som Mini Crosser Jazzy'en er blevet erhvervet igennem.


Hjulskift på Mini Crosser Jazzy 1120 og Mini Crosser Jazzy 1170:

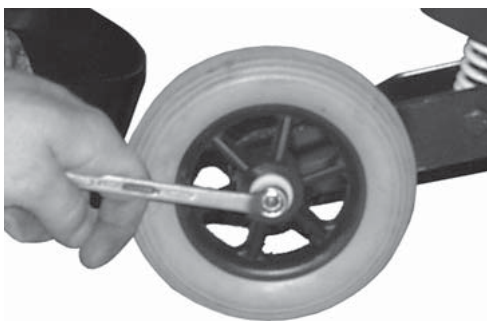

Figur 8 Sikkerhedshjulet (det forreste): Den midterste skrue løsnes og tages ud. Hjulet kan nu vrikkes af.



Figur 9 Støtتهjulet (det bagerste): Den midterste skrue løsnes og tages ud. Ved påmontering skal man være opmærksom på, at de 2 skiver, som sidder mellem hjulet og gafflen, skal monteres igen (Mini Crosser Jazzy 1120)

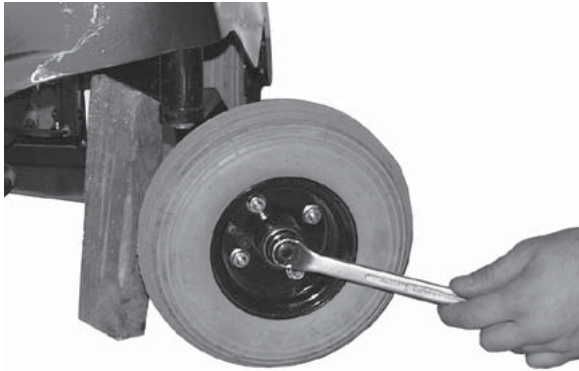

Figur 10 Støtthjulet (det bagerste): Den midsterste skrue løsnes og tages ud. Hjulet kan nu vrikkes af. (Mini Crosser Jazzy 1170)



Figur 11 Centerhjulet: Den midsterste møtrik løsnes og tages ud. Hjulet kan nu vrikkes af.

Det anbefales at man ved udskiftning af centerhjulet, kontakter sin hjælpemiddelcentral eller lignende sted hvor man har det rigtige værktøj. Kontakt evt. Mini Crosser A/S.


Afsnit 6.2 Sikringer

Mini Crosser Jazzy's styringen er udstyret med en strømbegrænsning, som slår fra ved overbelastning. Når styringen er afkølet, kan Mini Crosser Jazzy køre igen.

Indikatorlampen blinker ved overophedning, sluk for køretøjet, vent 3 minutter og tænd igen.

Under dækslen på bagskærmen af Mini Crosser Jazzy findes en thermosikring, som beskytter batterikredsløbet .

Denne sikring er hvid. Hvis den springer op, kan man efter nogle minutter trykke den ned igen. Hvis det samme sker umiddelbart igen, bør man kontakte autoriseret forhandler. Der findes ingen ydre sikringer, der skal skiftes.

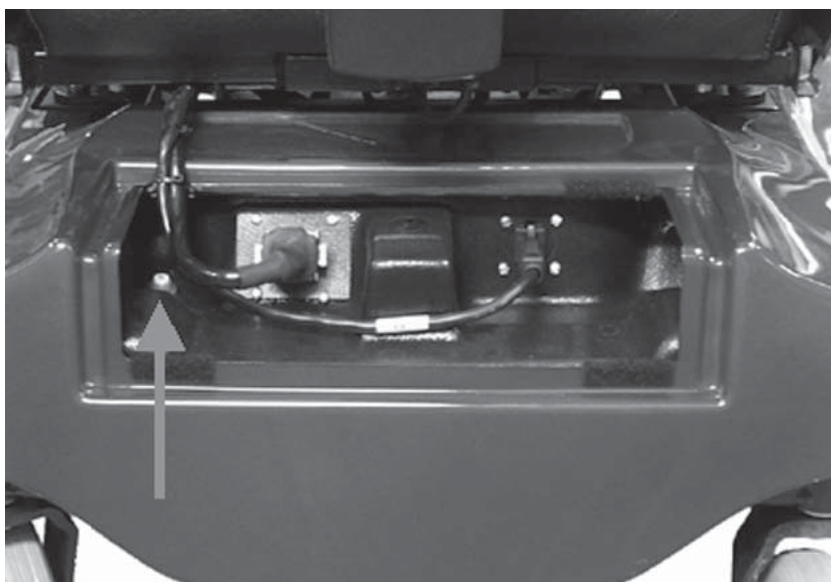

Figur 12 Thermosikringen sidder under dækslet på bagskærmen.

Afsnit 6.3 **Batterier og opladning**

Ladestandsviseren fortæller, hvor meget strøm, der er til rådighed for kørestolen:

- Rød, gul, og grøn viser, at batterierne er fuldt opladet.
- Rød og gul viser, at det er ved at være en god ide at lade batterierne op.
- Rød viser, at batterierne skal oplades så hurtigt som muligt, da kørestolen ellers slår fra.

BEMÆRK: Når batterierne er ved at være afladede, vil måleren blinke langsomt for at huske Dem på, at batterierne trænger til opladning.

Batterierne på Mini Crosser Jazzy bør oplades, når køretøjet ikke er i brug. Dette vil forlænge batteriernes levetid. Den type oplader, som leveres fra fabrikken, virker automatisk således, at den selv slår fra, når batterierne er fuldt opladede. Opladeren sørger endvidere for, at batterierne altid er fuldt opladede og dermed klar til brug.

Mini Crosser Jazzy er leveret med lukkede vedligeholdelsesfrie batterier, som normalt ikke giver gasudvikling og ikke kræver efterfyldning med vand.

Åbne batterier må aldrig monteres i Mini Crosser Jazzy.

Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden samt ved lave temperaturer.

Vær opmærksom på, at Mini Crosser Jazzy'en kun er fuldt opladet, når indikatoren på opladeren er slået over på grønt. Batteriindikatoren på selve køretøjet vil efter kort tids opladning vise "fuld", men batterierne er altså først fuldt opladede, når opladeren viser grønt.

Ved opladning, mens køretøjet er tændt, skal man være opmærksom på følgende:

Ladestandsviser (fig. 4 side 9) begynder at blinke.

Ladestandsviseren (fig. 4 side 9) vil efter opladning (dvs. når ladestikket er taget ud) fortsat blinke ca. ½ til 1 min., hvorefter den holder op med at blinke.

Hvis Mini Crosser Jazzy'en stilles bort i længere tid, vil det være tilstrækkeligt at lade op en gang om måneden.

Batterikapaciteten ved -10°C er halvdelen af tilsvarende kapacitet ved +20°C.

Sikkerhedsforskrifter:

Batterierne må ikke udsættes for åben ild.

Gamle batterier skal bortskaffes efter foreskrevne regler. Forhandleren, som har leveret batterierne, tager gamle batterier tilbage og sørger for, at de bliver destruerede efter de gældende forskrifter.

Lukkede/forseglede batterier må ikke åbnes.

Laderen må **ikke** stå på sædet under selve opladningen.



Figur 13 Ladestik.



Figur 14 Den hvide streg, som er markeret over stikket skal passe med den hvide streg på ladesticket.

Opladeren skal bruge 210 - 230 V (vekselstrøm).

Sådan afmonteres batterierne uden værktøj:


Sluk altid for strømmen inden afmonteringen påbegyndes.

Under sædet er der fire fingerskruer, som løsnes og tages af. Derefter skal de 2 stik, som sidder under dækslet på bagskærmen tages af.

Findes der elektriske benstøtter på Mini Crosser Jazzy'en, skal man også huske at tage disse stik ud. De sidder på højre og venstre side af sædet. Findes der ligeledes elektrisk sædehejs på køretøjet, skal man også huske at afmontere dette stik.

Sædet kan herefter vippe fremad, og man har nu adgang til batterierne.


Plus- og minuspolerne afmonteres på begge batterier. Remmen omkring batterierne løsnes. Batterierne kan nu udskiftes.

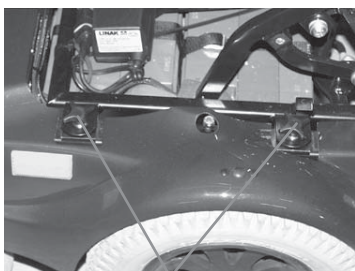

Figur 15 Her kan man se 2 af de 4 fingerskruer som skal løsnes og tages af.




Figur 16 Dette er dækslet, som kan løftes op og tages helt af, da det „kun“ sidder fast med velcrobånd.

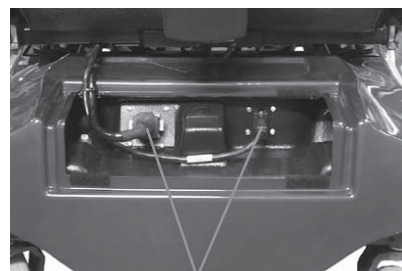

Figur 17 De 2 stik under dækslet på bagskærmen skal afmonteres.


Mini Crosser A/S

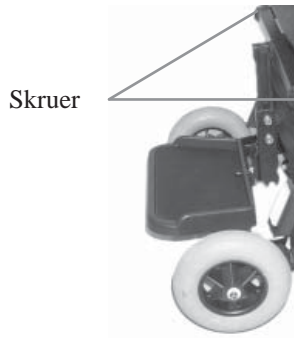

Figur 18 Dette billede er kun aktuelt, hvis der findes længdeindstillelig fodplade. Skruerne løsnes, og fodpladen vipres op.




Figur 19 Dette billede er kun aktuelt, hvis der findes manuelle benstøtter. Skruerne løsnes og benstøtterne vipres af. HUSK det skal gøres i begge sider.

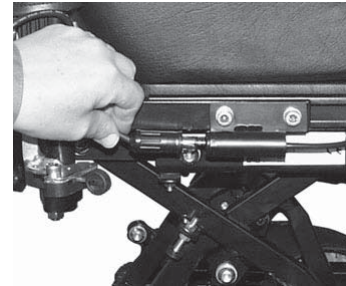


Figur 20 Dette billede er kun aktuelt, hvis der findes elbenstøtter. Stikkene tages ud i begge sider.



Figur 21 Sæddet kan herefter vipres op. Stroppen vil holde sæddet.

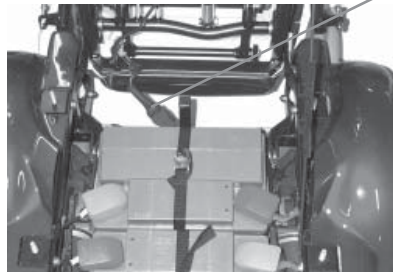

Figur 22 Dette billede er kun aktuelt, hvis der findes tilt / hejs. Stikket tages ud.

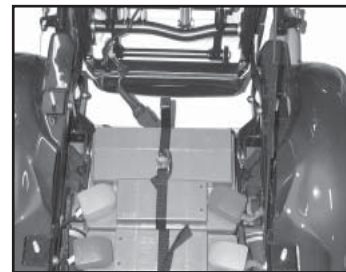

Figur 23 Når sæddet er vipret frem, er der fri adgang til batterierne. Polerne afmonteres og remmene løsnes.

Afsnit 6.4 Opbevaring

De skal opbevare Mini Crosser Jazzy'en et tørt sted, hvor temperaturen er konstant. Batterierne skal oplades min. 1 gang om måneden, hvis Mini Crosser Jazzy ikke bliver benyttet.

Hvis ikke disse anvisninger følges, kan man risikere at kørestolen (stellet) begynder at ruste, og at elektronikken bliver beskadiget.

Afsnit 6.5 Pleje

Mini Crosser Jazzy'en er konstrueret sådan, at den kræver meget lidt pleje og vedligeholdelse.

Vi anbefaler et regelmæssigt eftersyn hos Deres forhandler 1 gang om året.

Følgende punkter skal regelmæssigt vedligeholdes og efterses:

1. Dæktrykket:
Se afsnit 6.1 side 16.
2. Dækkenes tilstand:
Kontrolleres for revner og unormalt slid.
3. Ledninger:
Kontrollér, at isoleringen på ledningerne ikke er beskadiget.
4. Skærmdele:
Skærmens højglans vender tilbage efter benyttelse/behandling med auto voks efter forudgående aftøring.
5. Styringsenhed med joystick:
Sørg for at disse dele holdes tørre.

Forebyggende vedligeholdelse:

A. Pleje i al almindelighed

Hvis styringsenheden er blevet tilsmudset af madvarer eller andet, bør den aftørres med en fugtig klud.

Rengøring af Mini Crosser Jazzy må kun foretages med en fugtig klud.

Anvendelse af højtryksrensere eller vandslange vil forårsage skader på køretøjets elektronik!

B. Daglig funktionstest med slukket kørestol.

1. Undersøg joysticket for synlige skader.
2. Tryk joysticket i alle mulige retninger og læg mærke til, om det automatisk går tilbage til neutralstilling, når det slippes. Såfremt joysticket ikke automatisk flytter sig tilbage i neutralstillingen, må De ikke benytte kørestolen. De bør også kontrollere, at kørestolen bremses, når joysticket slippes.
3. Se kørestolen efter for synlige skader.
4. Tænd for køretøjet. Kontroller, at ladestanden er ok.

Afsnit 6.6 Frikobling & Bugsering:

Frikobling.


Mini Crosser Jazzy er udstyret med frikobling. Frikoblingshåndtaget sidder lige under bagskærmen.

Med dette håndtag kan drivenhederne slås fra, og kørestolen kan skubbes manuelt. For at slå motoren til igen, skal håndtaget bringes tilbage til udgangspositionen.

Er håndtaget svært at trække opad, så prøv at rykke kørestolen frem og tilbage et par gange.

BEMÆRK: Det er vigtigt at huske, at når kørestolen er frikoblet, er bremsesystemet ude af drift.

ADVARSEL: Stil aldrig Mini Crosser Jazzy'en i frikobling, når De holder i bakket terræn. Dette bevirker at kørestolen **ikke** automatisk er bremsset, og at den vil begynde at trille af sig selv. Dette kan føre til alvorlige maskinelle- og eller personskader.

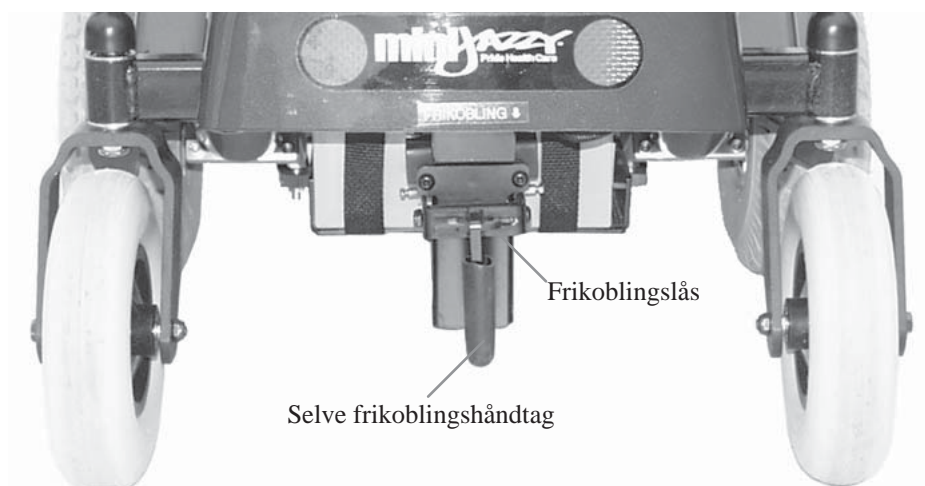


Figur 24 For at frikoble Mini Crosser Jazzy skal frikoblingslåsen trykkes ind, og derefter skal man trække op i selve frikoblingshåndtaget. For at slå drivenhederne til igen skal håndtaget trækkes ned igen.

Bugsering

Hvis man skulle være uheldig at få motorstop, kan Mini Crosser Jazzy trækkes eller skubbes. Mini Crosser Jazzy skal altid være slukket og frikoblet under bugsering.

Skal Mini Crosser Jazzy trækkes, fastgøres et tov til bugseringsbeslag fortil – markeret med gult. Træk ikke hurtigere end svarende til normal maksimumsfart for køretøjet.

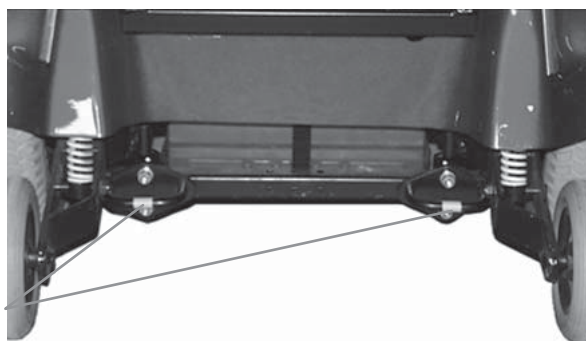

Figur 25 Det ene sæt bugseringsbeslag sidder lige under skærmen fortil

Afsnit 7 Færdselsregler

Mini Crosser Jazzy med en maksimal hastighed på op til 10 km/t regnes i færdselsloven som cykel. Færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t.

Ved kørehastighed under 6 km/t regnes Mini Crosser Jazzy som en "fodgænger", og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet.

Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrhjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt, men hofteselev kan anbefales.


Afsnit 8 Transport i bil

Mini Crosser Jazzy skal altid være fastspændt under transport. Undgå at løfte i sæde og skærme, løft i støttehjul fortil og bagtil. Fastspænding i bil sker med seler fastgjort i 2 "øjer" fortil og 2 "øjer" bagtil, alle markeret med gult.

Beslaget er ikke testet til persontransport.



Figur 26 Bugseringsbeslagene fortil sidder under skærmen.

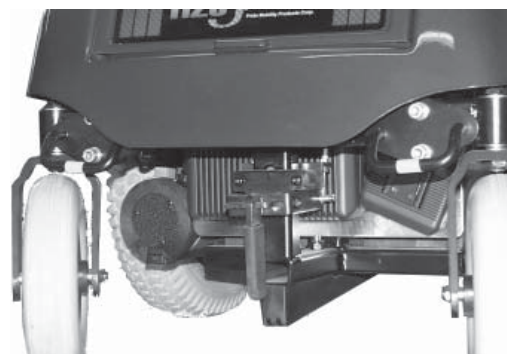

Figur 27 Bugseringsbeslagene bagtil sidder også under skærmen.

Afsnit 9 Transport i fly

Hvis Mini Crosser Jazzy skal transporteres i fly, kræver flyselskaberne, at batterierne er flygodkendte, og at luften er lukket ud af dækkene.

Ofte kræves desuden, at batteriledningerne er afmonteret, se afsnit 6.3 side 18-20.

Afsnit 10 Forsikring

En Mini Crosser Jazzy med max. hastighed på 10 km/t er i lovens forstand en cykel, og der kræves derfor ikke en speciel forsikring.

De fleste indbo-/villaforsikringer gælder som ansvarsforsikring for cyklister, og dermed er også brugere af Mini Crosser Jazzy omfattet af denne type forsikringer.

Vi anbefaler, at De taler med Deres forsikringselskab herom ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes separat.

Afsnit 11 Fejlfinding

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Mini Crosser Jazzy vil ikke køre. Der er ikke lys i ladestandsviseren.	Der er ikke tændt for start / stop (I/O knappen) Batterierne er afladede. Thermosikring er slået ud. Den sidder under dæksel bagpå køretøjet. Ladestik sidder i. Funktionsfejl.	Tænd køretøjet. Oplad batterierne i mindst 12 timer. Tryk thermosikringen ind. Sluk for oplader og tag ladestik ud. Kontakt leverandør.
Mini Crosser Jazzy vil ikke køre, men der er lys i ladestandsviseren.	Der er trykket på en funktionstast for en funktion, der ikke er monteret. Indikatorlampe nr. 13, side 10 vil være tændt og der vil være lys ud for den aktiverede funktionstast. Fejl i elektronikken.	Tryk på den funktionstast, der lyser, og sluk på I/O knappen. Vent 5 sek., tryk på I/O knappen igen. Kontakt leverandør.
Kørehastigheden er for lav.	Der er for lidt luft i dækkene. Kørestolen er overbelastet. Sædet er hævet over sin laveste stilling. (Lampe blinker over I/O knappen) Batterikapaciteten er for lav.	Pump luftfyldte hjul til 2,8 bar. Stop og vent et par minutter før start. Sænk sædet. Oplad eller udskift batterier.
Kørestrækningen er for lille pr. opladning.	Batterierne er ikke i orden. Opladeren er ikke i orden. Der for lidt luft i dækkene. Fremgangsmåden for opladning er forkert. Defekt gearmotor (Indikatorlampe lyser på styrepanelet under I/O knappen)	Oplad batterierne og kontroller, at den grønne lampe på opladeren lyser. Kontakt leverandøren. Pump dækkene op til 2,8 bar. Læs brugsanvisning. Kontakt leverandør.

Mini Crosser A/S

Ladelampe på oplader lyser ikke, når oplader sluttes til lysnet.	Ingen strøm i kontakten. Fejl i ledning. Fejl i oplader.	Tænd for kontakten. Læs venligst den medleverede brugsanvisning for oplader. Kontakt leverandør.
Lampe på oplader lyser ikke, selv om oplader har stået og ladet i 12 timer.	Der har været strømafbrydelse. Laderen er i gang med efterladning. Batterierne er ikke i orden. Der er fejl i ladestiktilslutning til Mini Crosser Jazzy.	Slut opladeren til igen og gentag ladeforløb. Kontroller igen ½ time senere. Kontakt leverandør. Skub ladestik helt ind og gentag ladeforløb.
Opladers kontrol-lampe lyser ved tilkobling med ikke fuldt opladede batterier.	Sikring i opladeren er sprunget. Ladestik er defekt.	Kontakt leverandør. Kontakt leverandør.
Opladers kontrol-lampe lyser.	Ladestik ikke sat ind. Evt. fejk i ledningsnet.	Skub opladestik ind. Kontakt leverandør.

Styringsenheden kan ved funktionsfejl henvise til den opståede fejltype.

Ved en evt. fejl i motor eller andet fremkommer et lyssignal i den grønne indikatorlampe over I/O knappen. Blinksignaler angiver en bestemt fejltype.

Der er fejltyper, som man selv kan afhjælpe ved at slukke køretøjet på I/O knappen og tænde efter 5 sek. De kan også kontrollere, at der ikke fejlagtigt er aktiveret en ikke monteret funktion.

Hjælper ovenstående ikke, kontakt Deres leverandør.

Afsnit 12 Garanti

Mini Crosser A/S yder 3 års garanti på alt undtagen batterier, oplader, dæk og andre sliddele. På disse dele gives 12 måneders garanti.

Garantien bortfalder, hvis:

- Mini Crosser Jazzy repareres af uautoriserede personer.
- Garantien på batterierne bortfalder, hvis der anvendes andre opladere end den medfølgende.
- Hvis batterierne har henstået dybdeafloadede i mere end 1 uge.

Mini Crosser A/S hæfter ikke for transportskader.

Afsnit 13 Tekniske data

	Mini Crosser Jazzy 1120	Mini Crosser Jazzy 1170
Hjulstørrelse: Sikkerhedshjul: de forreste Centerhjul: de midterste Støttehjul: de bagerste	Ø 150 mm / massive. Ø 250 mm / luft. Ø 200 mm / massive.	Ø 200 mm / massive. Ø 400 mm / luft. Ø 230 mm / luft.
Dæktryk - Centerhjul	2,8 bar	2,8 bar
Dæktryk - Støttehjul	massive	2,8 bar
Max. hastighed	8 km/t.	10 km/t.
Frihøjde	7,5 cm.	10 cm.
Vendediameter	100 cm.	120 cm.
Total længde	89 cm.	102 cm.
Total bredde	65 cm.	67 cm.
Motor	2 motor med centerdrev	2 motor med centerdrev
Batterier	2 x 12v / 56 Ah	2 x 12v / 56 Ah
Batterimål	27,8 x 17,5 x 19 cm.	27,8 x 17,5 x 19 cm
Batterivægt	2 x 18 kg.	2 x 18 kg.
Ladetid	Minimum 8 timer	Minimum 8 timer
Ladeapparat, 24V DC	8 - 10 amp	8 - 10 amp
Kørestrækning	40 km.	40 km.

Mini Crosser A/S

Elektronik	70 amp. Dynamic	70 amp. Dynamic
Max. person vægt	150 kg.	150 kg.
Vægt uden sæde	98,5 kg.	100,5 kg.
Sædebredde / -dybde	Se Jazzy hovedbrochurer	Se Jazzy hovedbrochurer
Sæderyghøjde	Se Jazzy hovedbrochurer	Se Jazzy hovedbrochurer
Affjedring	Ja	Ja
Kantforcering	7 cm	10 cm
Stigevne med max. person- vægt	10°	10°
Muligheder for ekstraudstyr	Ja	Ja
Blinklys	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Lys	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Pære forlygte	5 W	5 W
Pære baglygte	5 W	5 W
Pære blinklygte	21 W	21 W
Standard farve	Grøn / Rød	Rød
Klassificering	Klasse B	Klasse B

Afsnit 14 Introduktion til sæder

Afsnit 14.1 Instruktion / Ergo Standard sæde



Figur 28

Armlænhældning:

Justerskruen og låsemøtrik muliggør, at armlænets hældning kan justeres med ca. 15°.

Efter indstilling spændes låsemøtrikken.

Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og udstigning.

Ryglænhældning:

Standard:

Ryglænhældningen kan justeres med ca. 10°. Dette gøres ved at løsne justerskruen. Derefter kan man ændre afstandsstykkets position, som har indflydelse på ryglænets hældning. Efter justering fastspændes skruen igen.



Figur 29



Figur 30


Ekstra udstyr:

Kan udstyres med gascylinder som vist for regulering af ryglænhældning.

Når håndtaget trækkes opad kan ryglænet indstilles ca. 25° frem og tilbage regnet fra lodret stilling.

Når håndtaget slippes igen, låses ryglænet automatisk igen.

Afsnit 14.1 Instruktion / Ergo Standard sæde.....fortsat

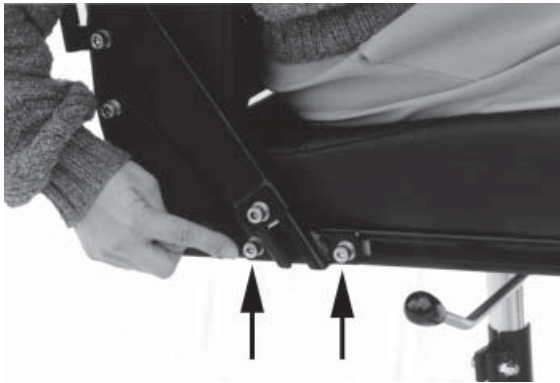

Armlæn frem / tilbage:

Armlænet kan forskydes frem / tilbage i C-skinne. Dette gøres ved at løsne skrueerne som vist.


Efter endt indstilling fastspændes skrueerne igen

Figur 31

Ryglæn frem / tilbage:

Sædedybden kan reguleres. Dette gøres ved at forskyde sæderyggen frem og tilbage samtidig med at sædepuden skal være fastholdt. De angivne skrue løsnes i begge sider. Sæderyggen kan da forskydes ca. 15 cm fremad.

Skrueerne fastspændes efter justering. Skrue skal være mindst 2 cm fra C-skinneens ende.

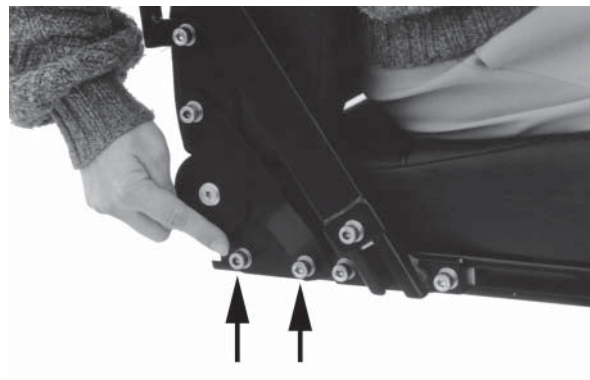

Figur 32

Afsnit 14.2 Instruktion / Ergo Lux sæde



Armlænhældning:

Justerskrue og låsemøtrik muliggør at armlænets hældning kan justeres med ca. 15°.

Efter indstilling spændes låsemøtrik.

Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og udstigning.

Figur 33

Ryglænhældning:

Standard:

Ryglænhældningen kan justeres med ca. 10°. Dette gøres ved at løsne justerskrue og derefter ændre afstandsstykkets position, som har indflydelse på ryglænets hældning.

Efter justering fastspændes skrueen igen.



Figur 34



Figur 35

Ekstra udstyr:

Kan udstyres med el-actuator eller som her vist gascylin der for regulering af ryglæns hældning.

Når håndtaget trækkes opad kan ryglænet indstilles ca. 25° frem og tilbage regnet fra lodret stilling.

Når håndtaget slippes igen, låses ryglænet automatisk igen.



Figur 36

Armlæn frem / tilbage:


Armlænet kan forskydes frem / tilbage i C-skinne. Dette gøres ved at løsne skruerne som vist.

Efter endt indstilling fastspændes skruerne igen.

Ryglæn frem / tilbage:

Sædedybden kan reguleres. Dette gøres ved at forskyde sæderyggen frem og tilbage samtidig med, at sædepudden skal være fastholdt. De angivne skruer løsnes i begge sider. Sæderyggen kan da forskydes ca. 15 cm fremad.

Skruerne fastspændes efter justering. Skruer skal være mindst 2 cm fra C-skinne enden.

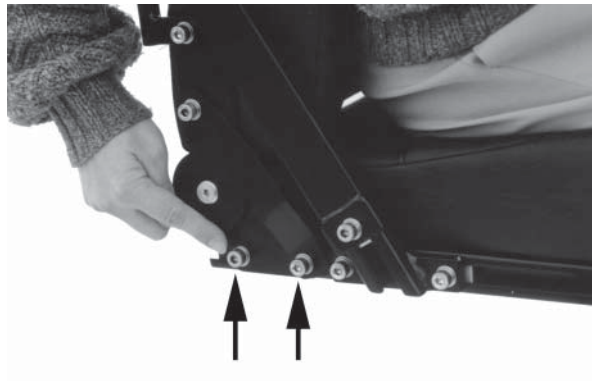


Figur 37



Figur 38 Nakkestøtte til Ergo Lux sæde.

Afsnit 15 Introduktion til fodplade og fodstøtter

Afsnit 15.1 Indstilling af fodplade

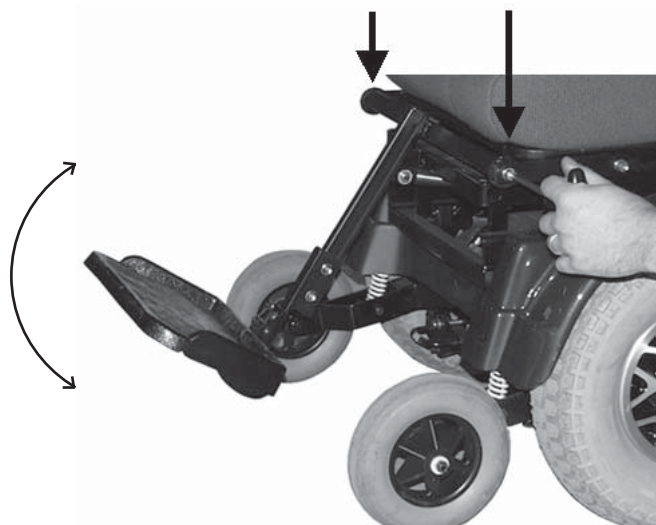


Figur 39 For at justere fodpladen, så vinklen passer til benene, skal de viste skruer løsnes. Derefter kan man justere fodpladen.

HUSK at skrue skruerne ordentlig fast igen.


Figur 40 For at justere selve fodpladen op/ned skal skruerne som vist løsnes.

Juster fodpladen op/ned og HUSK at skrue skruerne ordentlig fast igen.

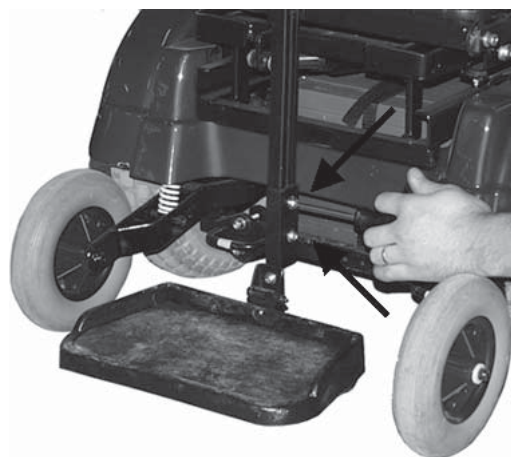

Figur 41 Fodpladen justeres frem/tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer.


HUSK at efterspænde skruerne ordentlig igen.

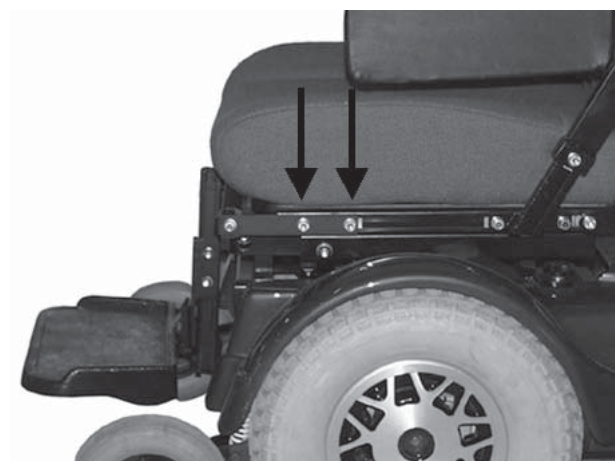


Afsnit 15.2 Indstilling af fodstøtter



Figur 42 Fodstøtterne kan justeres frem/tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer. HUSK at efterspænde skruerne ordentlig igen.

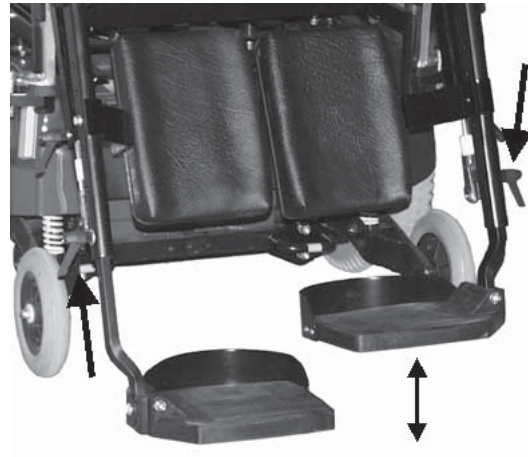

Figur 43 For at justere selve fodhvilerne op/ned skal kipspændet som vist løsnes, og fodhvilerne kan justeres.

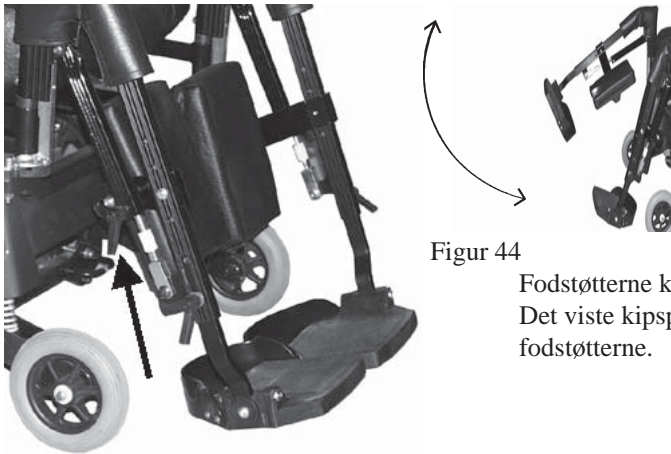

Figur 44

Fodstøtterne kan justeres i vinkel, så de passer til benene. Det viste kipspænde løsnes, og herefter kan man justere fodstøtterne.



Figur 45 Fodstøtterne kan svinges til siden. Dette gøres ved at trykke ind på det viste sted med fingeren.



Figur 46

Selve fodhvilerne kan svinges fra midterstilling og ud til siden uden brug af værktøj. Benstøtterne kan tages helt af ved at løfte op i selve benstøtterne. Lægpudderne kan justeres op/ned i 4 trin (Se figur 46)