



medemagruppen



Terapeut vejledning MC Jazzy 1121

Her finder De Medema i Danmark

Hovedkontor/Jylland:

Medema Danmark A/S

Enggårdvej 7

Snebjerg

7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55

Telefax: 97 18 88 35

E-mail: info@medema.com

Hjemmeside: www.medema.dk

Sjælland:

Medema Danmark A/S

Ådalen 9

4600 Køge

Telefon: 70 10 17 55

Telefax: 56 64 33 88

E-mail: info@medema.com

Fyn:

Medema Danmark A/S

Sivlandvænget 6

5260 Odense S

Telefon: 70 10 17 55

E-mail: info@medema.com

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Betegnelser	5
Introduktion DX2	6
Betegnelser - knapper	6
Betjening	6
Tænd/sluk for ur	7
Indstil hastighed	8
Indstilling af sæde - ryg og benstøtter	8
Tænd/sluk lyset	9
Indstilling af skærmlys	9
Indstilling af skærm-miljø	10
Indstilling af klokken	11
Fejlkode	12
Ekstra	13
Fodplade / fodstøtte	15
Introduktion til Ergo Lux	21
Swing away beslag	22
Justering af nakkestøtte	22
Indstilling af Spinalus ryg	23

Introduktion

Denne vejledning er et supplement til Brugervejledningen, og indeholder vejledning i brug og indstilling af køretøjet Mini Crosser Jazzy 1121.

Dette eldrevne køretøj er udviklet til såvel indendørs som udendørs brug. Et såkaldt klasse B køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske kørestole.

Vi råder over et stort udvalg i tilbehørsdele til Mini Crosser Jazzy, som kan monteres for at gøre hverdagen lettere for Dem. De er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information om special tilbehør og -tilpasninger.

Mini Crosser A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uheld eller usikker benyttelse af Mini Crosser Jazzy.

Har De yderligere spørgsmål til brugen af Mini Crosser Jazzy eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte os på:

Mini Crosser A/S

Telefon: 70 10 17 55

E-mail: info@minicrosser.com

Internet: www.minicrosser.dk

NB: Vi tager forbehold for trykfejl samt ændringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

Betegnelser


Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring senere i instruktionsbogen.



Introduktion DX2

DX2 er den første i en ny generation af joysticks til styring af elektriske kørestole. Med sin store LCD farveskærm og sin logiske ikonopbyggede menustruktur, leder den brugeren frem til målet.

Betegnelser - knapper

Dynamic DX2 AJR		
	1	Start/stop-knap
	2	Blinklys venstre
	3	Blinklys højre
	4	Funktionsvælger
	5	Display
	6	Hastighedsvælger
	7	Tilbehørsvælger
	8	Horn

Betjening

I toppen af displayet finder man statusbjælken. Batteriindikator vises hele tiden. Uret kan slåes til eller fra efter ønske. De øvrige lyser, når den tilhørende funktion er aktiv.

					
1	2	3	4	5	6
1	Batteriindikator Grøn = fuldt opladet Gult = mindst halv fuld Rød = næsten tom - oplad nu!				
2	Blinklys venstre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner				
3	Lyset er tændt				
4	Fejlkode - se afsnit om fejlkoder				
5	Blinklys højre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner				
6	Aktuel tid				

Tænd/sluk for ur



Tryk på pil op/ned eller joystick (pres fremad) indtil ovenstående ikon vises i centrum.



Brug "funktionstasten" til at skifte mellem X og ✓.

Acceptér med et tryk på pil op/ned tasten.


Indstil hastighed

Når man tænder joysticken vises nedenstående billede i displayet. I midten vises den hastighed man har valgt som maks. hastighed. Hastighed vælges ved at trykke på plus/minus tasten. Maks. hastighed er 5, laveste hastighed er 1.




De nederste funktioner vælges med knappen "funktionsvælger".

Indstilling af sæde - ryg og benstøtter

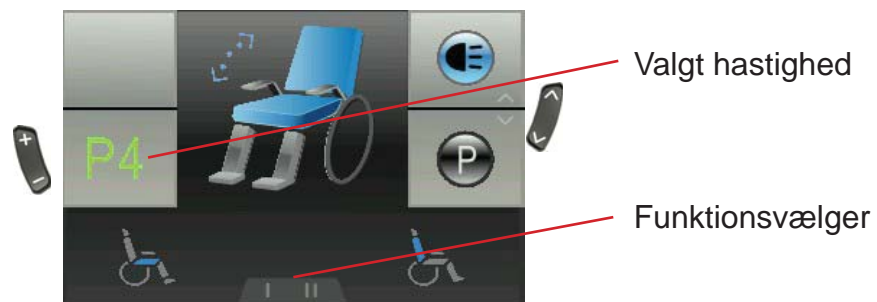

Tryk på pil op/ned indtil billedet viser stolen. Brug "funktionsvælgeren" til at vælge den funktion der ønskes ændret. Brug joysticket til at ændre f.eks. vinklen på sæderyggen.

Tænd/sluk lyset

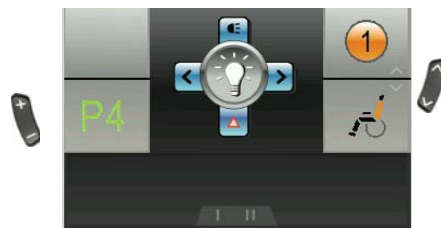

Tryk på pil op/ned indtil ikonet for lys fremkommer i centrum.

Pres herefter joysticket fremad for at tænde lyset. Pres igen fremad for at slukke lyset.

Pres joysticket tilbage for at aktivere katastrofeblink. Og på samme måde slukkes det igen.

Pres joysticket til højre eller venstre for at aktivere blinklyset. Og på samme måde slukkes det igen.

Indstilling af skærmlys




Tryk på pil op/ned til solen fremkommer i centrum. Brug joystick frem for at komme ind i indstillinger. Brug derefter tasten "funktionsvælger" eller joystick højre/venstre til at ændre på lysstyrken.

Joystick frem/tilbage eller pil op/ned accepterer de nye værdier og returnerer til hovedmenuen.

Indstilling af skærm-miljø

Brug pil op/ned indtil "dag/nat" ikonet vises i centrum. Brug joystick fremad for at vælge indstillinger. Nedenstående billede fremkommer.

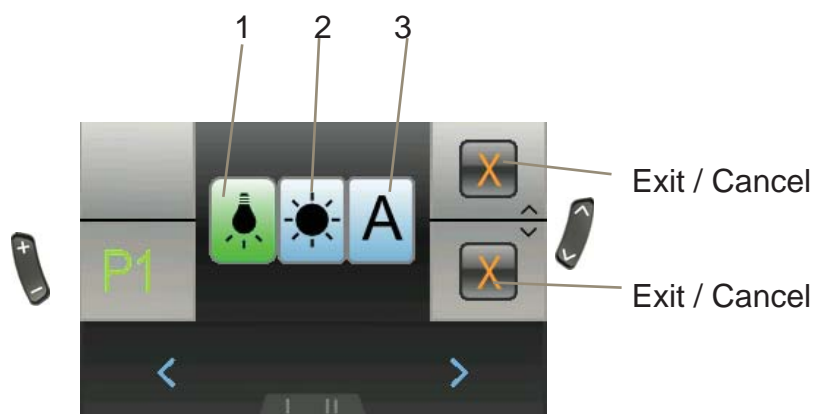

Opsætning	Resultat
1 - Indendørs	Skærmen har sort baggrund
2 - Udendørs	Skærmen har hvid baggrund
3 - Automatisk	Skærmen skifter baggrundsfarve (sort/hvid) afhængig af lyset i omgivelserne.

Brug "funktionsvælgeren" eller joystick højre/venstre for at vælge indstilling.


Joystick fremad accepterer de nye indstillinger og returnerer til hovedmenuen.

Joystick tilbage eller pil op/ned annullerer de nye indstillinger og går tilbage til hovedmenuen.

Indstilling af klokken



Brug pil op/ned indtil uret vises i centrum. Brug joystick fremad for at vælge indstillinger. Nedenstående billede fremkommer.

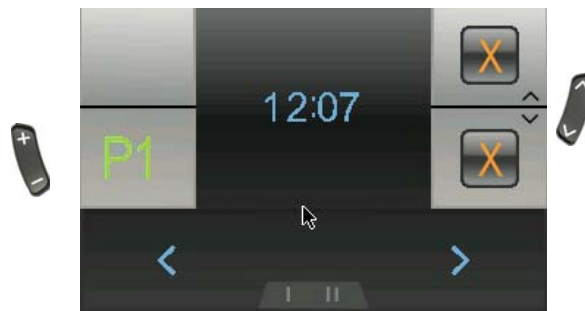

Brug "funktionsvælgeren" eller joystick højre/venstre til at vælge det ciffer der skal ændres.

Joystick fremad tæller op.

Joystick tilbage accepterer ny indstilling, og går tilbage til hovedmenuen.

Pil op/ned annullerer ny indstilling, og går tilbage til hovedmenuen.

Systemlås



For at låse DX systemet



Tryk på tænd/sluk knappen i 4 sek. mens systemet er tændt. Systemet vil nu lukke ned i låst tilstand.

For at låse DX systemet op

Tryk på tænd/sluk knappen. Systemet vil vise en lås i displayet.



Tryk på hornet 2 gange indenfor 10 sek. Systemet vil starte op på normal vis.

Fejlkode

Kode	Årsag	Betydning
1	DX Modulet	Kan betyde: - fejl i programmering - fejl i ledningsforbindelsen - intern fejl i et modul Sluk for stolen og tænd igen. Hvis ikke det virker, kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).
2	DX Accessory	Kan betyde: - kører langsom på grund af hævet sæde (programmering). Ikke en fejl Sænk sædet til nederste position. Hvis ikke det virker, kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).
3	Motor 1 / L (M1)	Kan betyde: - løs forbindelse fra motoren til powermodulet - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).
4	Motor 2 / L (M2)	Kan betyde: - løs forbindelse fra motoren til powermodulet - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).
5	Parkeringsbremse 1 (M1 venstre)	Kan betyde: - løs forbindelse - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).
6	Parkeringsbremse 2 (M2 højre)	Kan betyde: - løs forbindelse - kortslutning Check at ingen stik sidder løse. Kontakt kompetent tekniker (HMC eller terapeut).

Ekstra

DX2 joysticket kan ved hjælp af et DX Infra-red Interface Transmitter System, betjene alt elektronisk udstyr, som kan betjenes via fjernbetjening med infra rødt lys. Det være sig TV, radio, pc-mus og andet.

Tilbehør der gør det muligt:

DX-IRIS2 Infra-red Interface Transmitter System
Monteres på stolen, og kan kommunikere med infra rødt udstyr eks. tv, radio eller pc-mus.

DX-MTX Infra-red Mouse Transmitter
Monteres på stolen, og kan kommunikere med en infra rød pc-mus. Det gør det muligt at navigere musen rundt på en pc-skærm ved hjælp af joysticket. Se nedenfor.



Brug pil op/ned til at finde muse ikonet. Så længe musen er blå er den ikke aktiv. Aktiver med joystick fremad. Nu bliver musen grøn



Benyt joysticket til at flytte musen rundt på pc-skærmen.



Brug "funktionsvælgeren" til at klikke med musen. Det fungerer på samme måde som med musen. Man kan lave enkeltklik og dobbeltklik, afhængig af hvad pc'en er sat op til at bruge.

Deaktiver musen igen ved at bruge pil op/ned. Ny funktion kan nu vælges.


Fodplade / fodstøtte

Manuel central fodplade



For at justere fodplade, så vinklen passer til benene, skal de viste skruer løsnes. Derefter kan man justere fodpladen.

HUSK at skrue skruerne ordentlig fast igen.

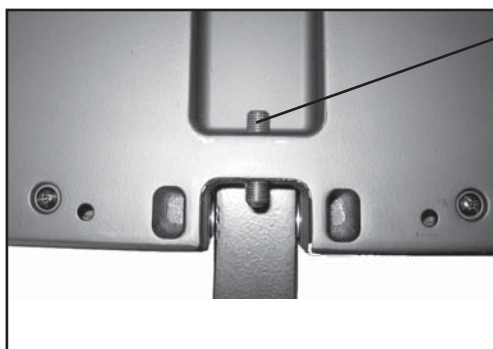


Justering af vinklen på selve fodpladen sker ved at pinolskruen under fodpladen justeres.



For at justere selve fodpladen op og ned skal de viste skruer løsnes. Derefter kan man justere fodpladen til den ønskede højde.


HUSK at skrue skruerne ordentlig fast igen.

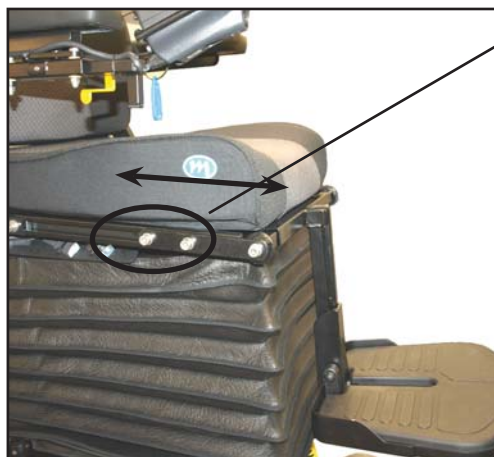

Fodpladen kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer i begge sider.


HUSK at efterspænde i begge sider.

Elektrisk central fodstøtte

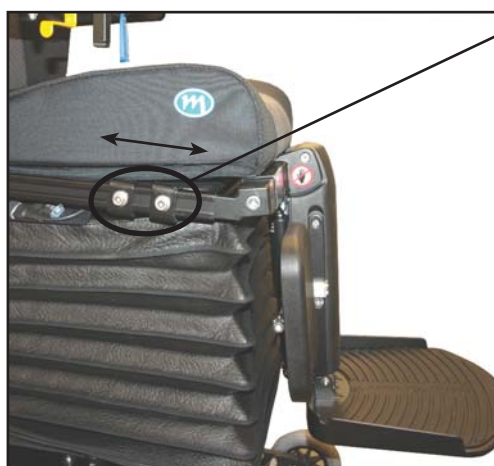

Fodpladen kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer i begge sider.


HUSK at efterspænde i begge sider.

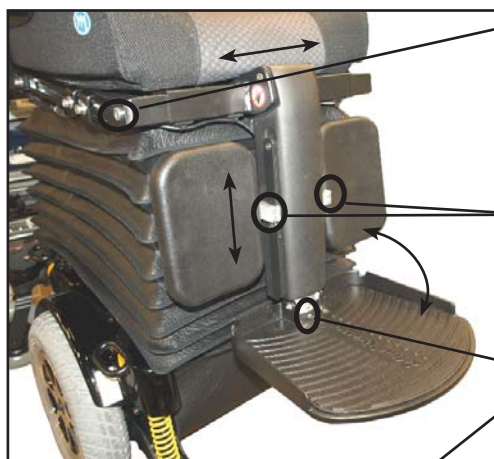

Centrering af fodplade:
Løsn skruer i begge sider - centrér og spænd fast igen.

Lægpunder justeres ved at løsne disse skruer. Indstil og spænd fast igen.


Vinklen på fodpladen justeres ved at skrue på pinolskruen her

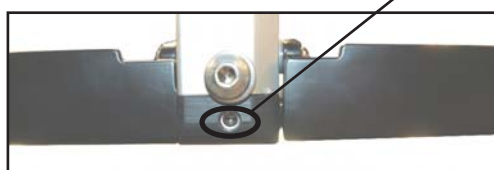



Justering af længden:
Slå over på indstilling af sædefunktioner ved at trykke på op/ned tasten.

Skift mellem de forskellige indstillinger med funktions-tasten. Når Ikonet for venstre benstøtten blinker kan længden justeres med joysticken.

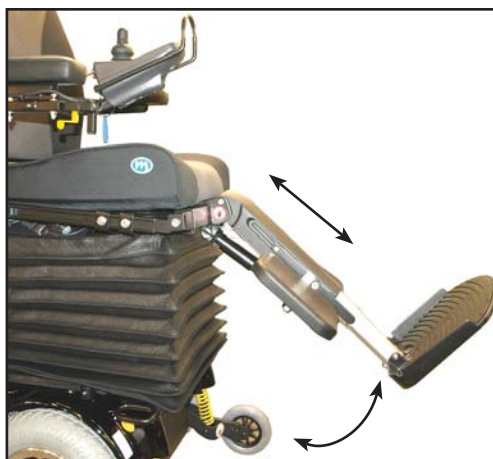


For at justere vinklen:
Brug funktions-tasten til at finde ikonet for højre fodstøtte. Før joysticken op/ned for at justere vinklen.


Justering af begge dele på én gang: Brug funktions-tasten til ikonet for begge fodstøtter lyser. Før joysticken op/ned for at justere.

Bemærk:

Ved brug af den elektriske centrale fodplade skal man være opmærksom på, at der er risiko for klemning i 4 områder, når fodpladen køres frem og tilbage. Se billedet nedenfor.

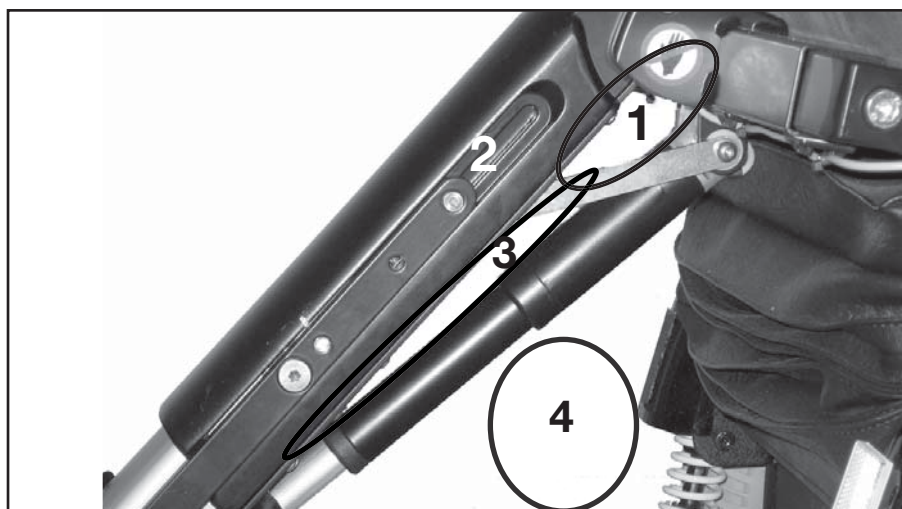

Manuelle fodstøtter

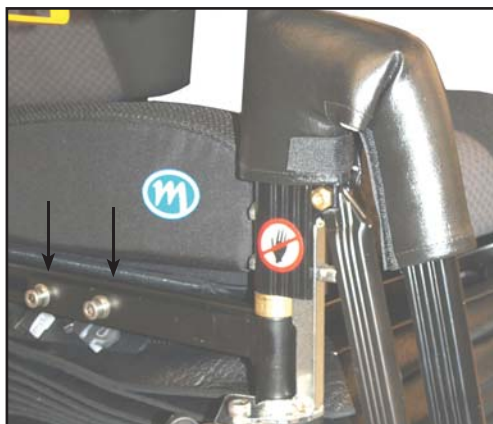

Fodstøtterne kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer.


HUSK at efterspænde skruerne ordentligt igen.



For at justere selve fodhvilerne op / ned skal kipspændet som vist løsnes, og fodhvilerne kan justeres.



For at justere selve fodstøtterne op / ned skal kipspændet som vist løsnes, og fodstøtterne kan justeres.

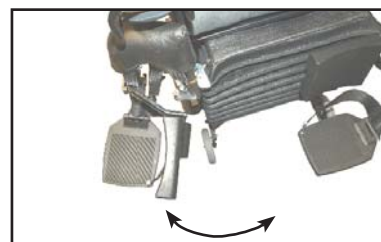

Fodstøtterne kan svinges til siden.

Dette gøres ved at trykke ind på det viste sted med fingeren. Og altså uden brug af værktøj.



Lægstøtterne kan justeres trinløst op / ned. Det gøres ved at løsne skruen, flytte lægstøtten og spænde skruen igen.

Elektriske fodstøtter



Fodstøtterne kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer.

HUSK at efterspænde skruerne igen.



Justering af højde og vinkel via joystick:

Skift til indstilling af sædefunktioner ved at trykke på op/ned til sædeikonet fremkommer.



Skift mellem de forskellige indstillinger med funktions-tasten.

Når ikonet for det man ønsker at justere lyser, anvendes joystick til justering.

Hvis begge lyser med begge "benstøtter", kan man justere begge benstøtter på én gang.



Lægpudderne justeres ved at løsne denne skrue. Husk at efterspænde efter endt justering.




Tryk på dette udløserhåndtag og sving benstøtten til siden.

I denne position kan benstøtten løftes af.

Bemærk:


Der er ingen ledninger, der skal afmonteres.

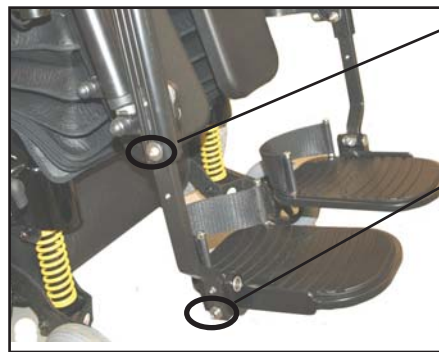

Højden kan justeres manuelt ved at løsne denne skrue, justere, spænde fast igen.

Vinklen på fodpladen justeres ved at løsne denne skrue, justere og spænde fast igen.

Introduktion til Ergo Lux

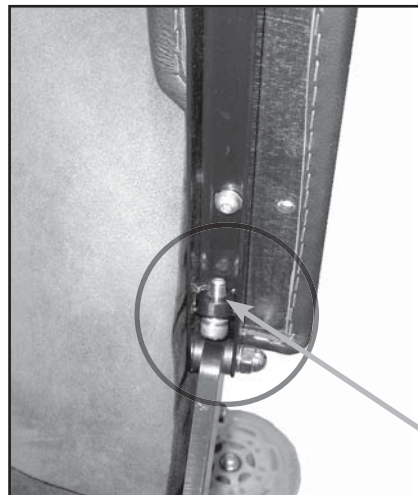


Armlæns-hældning

Justerskrue og låsemøtrik muliggør, at armlænets hældning kan justeres med ca. 15°.

Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og udstigning.


Justerskrue

Tilpasning af sædet

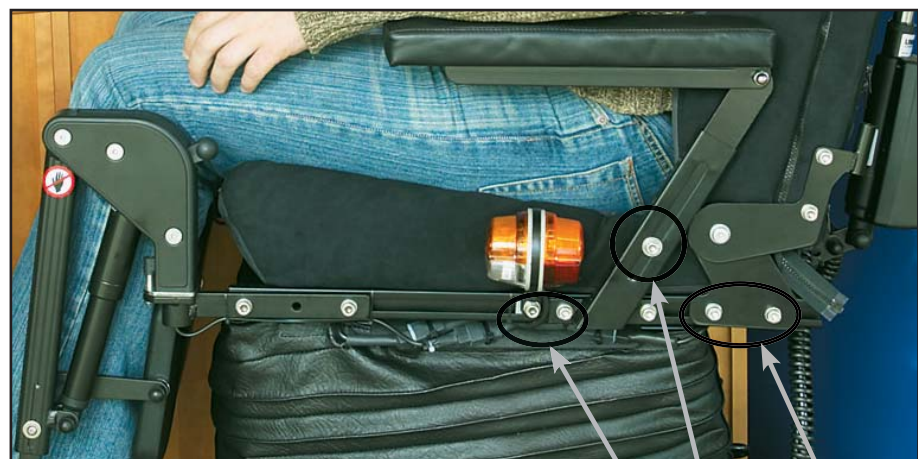

1. Tilpasning af armlæns-højden.
2. Tilpasning af armlæns-placering - frem / tilbage - 2 skruer.
3. Sædedybde-tilpasning, begge sider.

Justering af nakkestøtte

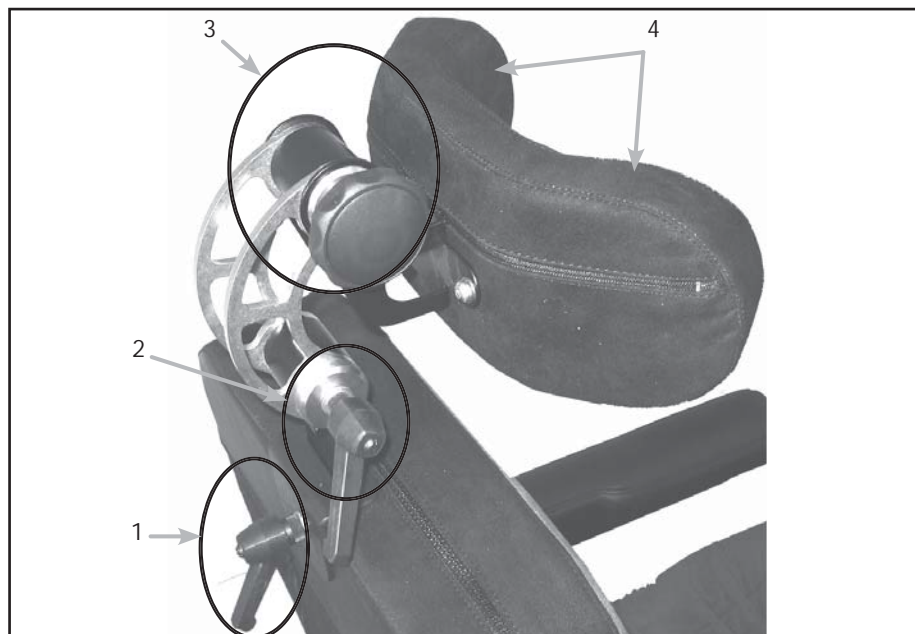

1. Højdejustering
2. Justering frem / tilbage
3. Vinkling af nakkestøtten
4. Justering af nakkestøtten



Swing away beslag



Udløserhåndtag

Jazzy kan være udstyret med et swing away beslag. For at betjene dette trykker man på udløserhåndtaget, og joysticken kan skubbes til siden.

Indstilling af Spinalus ryg

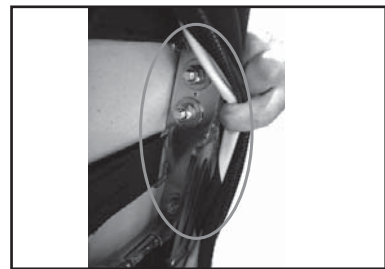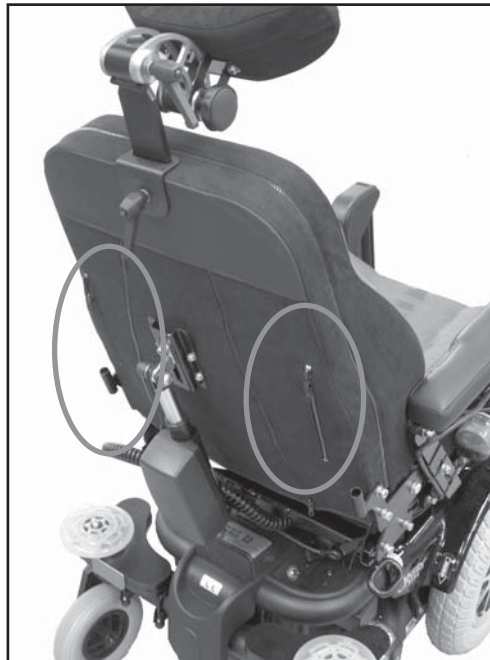

Nem adgang til justering gennem de 4 store lynlåse.



Fig. 1

Lige bag lynlåsene ses justeringsmulighederne og de 4 skruer, der skal løsnes for at indstille ryggen form.

Alle bolte på Spinalus ryggen kan løsnes og indstilles til brugeren.

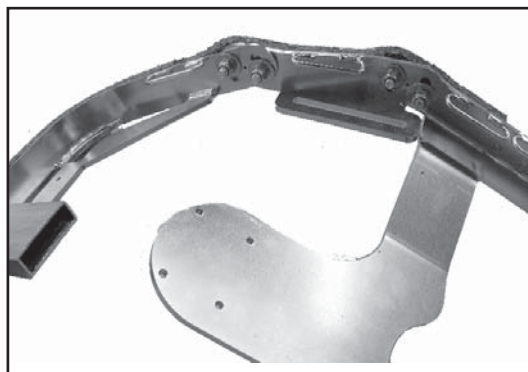


Fig. 2

Fig. 1 og 2 viser Spinalus ryggen i yderpositioner.



medemagruppen