



medemagruppen



Terapeut vejledning MC Jazzy 1170 II

Her finder De Medema i Danmark

Hovedkontor/Jylland:

Medema Danmark A/S

Enggårdvej 7

Snebjerg

7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55

Telefax: 97 18 88 35

E-mail: info@medema.com

Hjemmeside: www.medema.dk

Sjælland:

Medema Danmark A/S

Ådalen 9

4600 Køge

Telefon: 70 10 17 55

Telefax: 56 64 33 88

E-mail: info@medema.com

Fyn:

Medema Danmark A/S

Sivlandvænget 6

5260 Odense S

Telefon: 70 10 17 55

E-mail: info@medema.com

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	4
Betegnelser	5
Betegnelser DX2 - knapper	6
Betjening	6
Fodplade / fodstøtte	7
Introduktion til Ergo Lux.....	13
Swing away beslag.....	14
Justering af nakkestøtte	14
Indstilling af Spinalus ryg.....	15

Introduktion

Denne vejledning er et supplement til Brugervejledningen, og indeholder vejledning i brug og indstilling af køretøjet Mini Crosser Jazzy 1170 II.

Dette eldrevne køretøj er udviklet til såvel indendørs som udendørs brug. Et såkaldt klasse B køretøj i henhold til den europæiske klassificering af elektriske kørestole.

Vi råder over et stort udvalg i tilbehørsdele til Mini Crosser Jazzy, som kan monteres for at gøre hverdagen lettere for Dem. De er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information om special tilbehør og -tilpasninger.

Mini Crosser A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uheld eller usikker benyttelse af Mini Crosser Jazzy.

Har De yderligere spørgsmål til brugen af Mini Crosser Jazzy eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte os på:

Mini Crosser A/S

Telefon: 70 10 17 55

E-mail: info@minicrosser.com

Internet: www.minicrosser.dk

NB: Vi tager forbehold for trykfejl samt ændringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

Betegnelser


Nedenstående angivelse af betegnelser henviser til forklaring senere i instruktionsbogen.



INFO!

Jazzy 1170 II er forberedt for transportbeslag.

Betegnelser DX2 - knapper

Dynamic DX2 AJR		
	1	Start/stop-knap
	2	Blinklys venstre
	3	Blinklys højre
	4	Funktionsvælger
	5	Display
	6	Hastighedsvælger
	7	Tilbehørsvælger
	8	Horn


Betjening

I toppen af displayet finder man statusbjælken. Batteriindikator vises hele tiden. Uret kan slås til eller fra efter ønske. De øvrige lyser, når den tilhørende funktion er aktiv.

					
1	2	3	4	5	6
1	Batteriindikator Grøn = fuldt opladet Gult = mindst halv fuld Rød = næsten tom - oplad nu!				
2	Blinklys venstre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner				
3	Lyset er tændt				
4	Fejlkode - se afsnit om fejlkoder				
5	Blinklys højre er aktiv Ved katastrofeblink blinker begge ikoner				
6	Aktuel tid				


Fodplade / fodstøtte

Manuel central fodplade

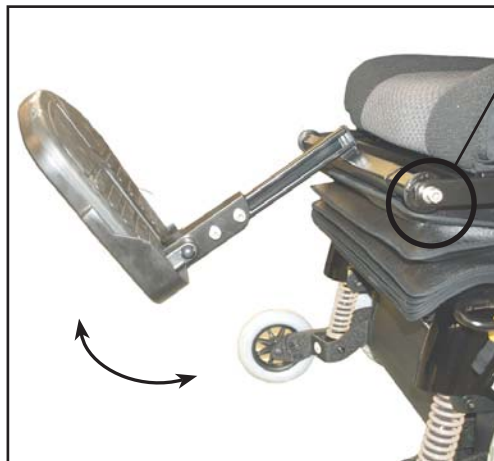

For at justere fodplade, så vinklen passer til benene, skal de viste skruer løsnes. Derefter kan man justere fodpladen.

HUSK at skrue skruerne ordentlig fast igen.

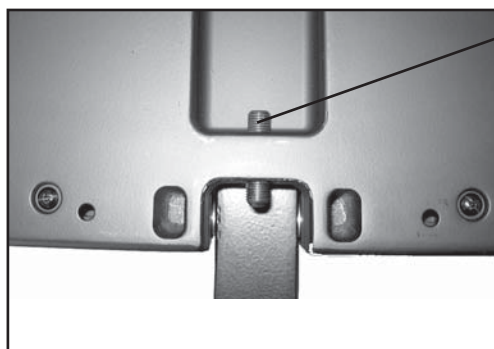


Justering af vinklen på selve fodpladen sker ved at pinolskruen under fodpladen justeres.



For at justere selve fodpladen op og ned skal de viste skruer løsnes. Derefter kan man justere fodpladen til den ønskede højde.


HUSK at skrue skruerne ordentlig fast igen.

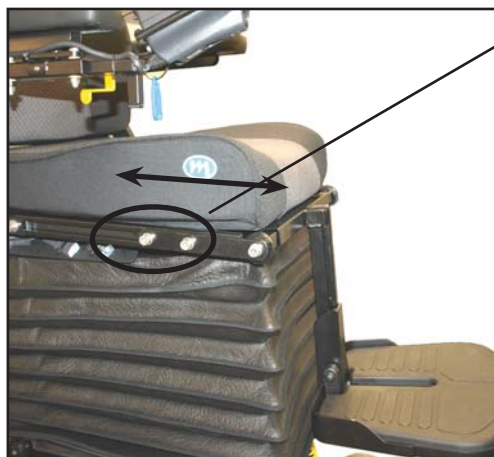

Fodpladen kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer i begge sider.


HUSK at efterspænde i begge sider.

Elektrisk central fodstøtte

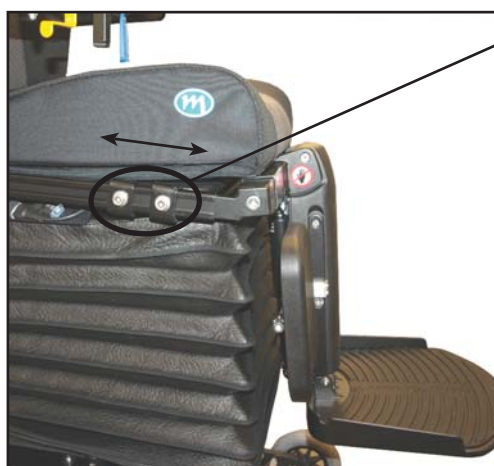


Fodpladen kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer i begge sider.

HUSK at efterspænde i begge sider.

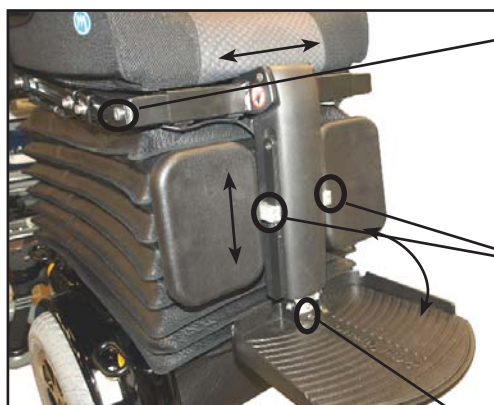

Centrering af fodplade:
Løsn skruer i begge sider - centrér og spænd fast igen.

Lægspuder justeres ved at løsne disse skruer. Indstil og spænd fast igen.

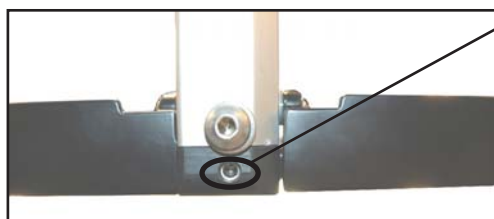


Vinklen på fodpladen justeres ved at skrue på pinolskruen her



Justering af længden:
Slå over på indstilling af sædefunktioner ved at trykke på op/ned tasten.

Skift mellem de forskellige indstillinger med Funktions-tasten eller joystick til højre/venstre. Når Ikonet for venstre benstøtten blinker kan længden justeres med joystick op/ned.

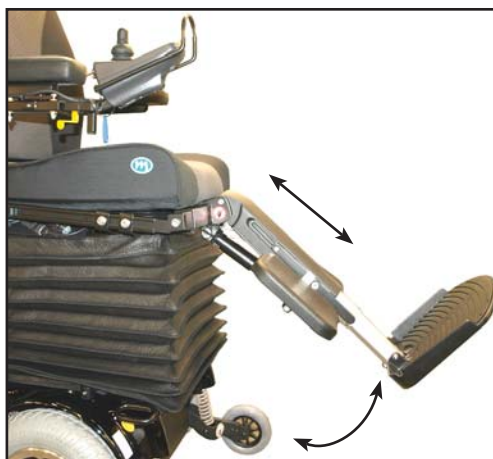


For at justere vinklen:
Brug joystick/funktions-tasten til at finde ikonet for højre fodstøtte. Før joysticken op/ned for at justere vinklen.


Justering af begge dele på én gang: Når ikonet for begge fodstøtter lyser. Før joysticken op/ned for at justere.

Bemærk:

Ved brug af den elektriske centrale fodplade skal man være opmærksom på, at der er risiko for klemning i 4 områder, når fodpladen køres frem og tilbage. Se billedet nedenfor.

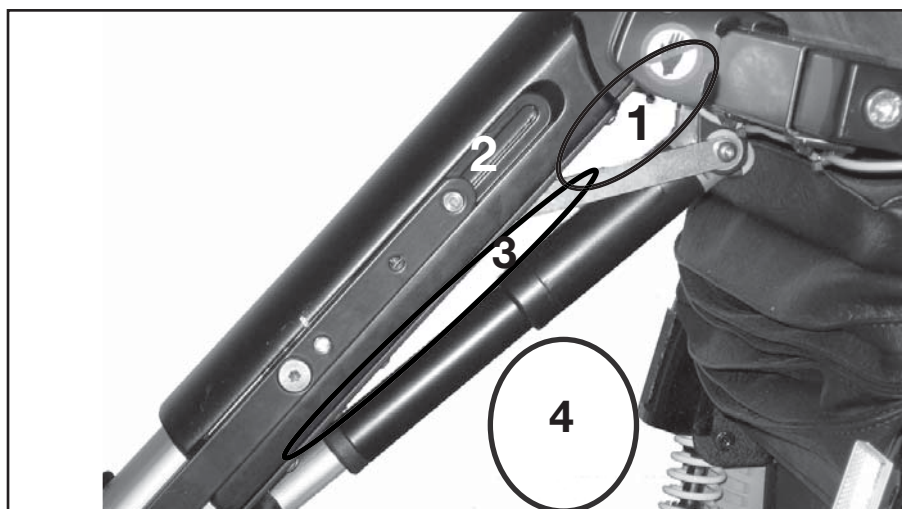

Manuelle fodstøtter

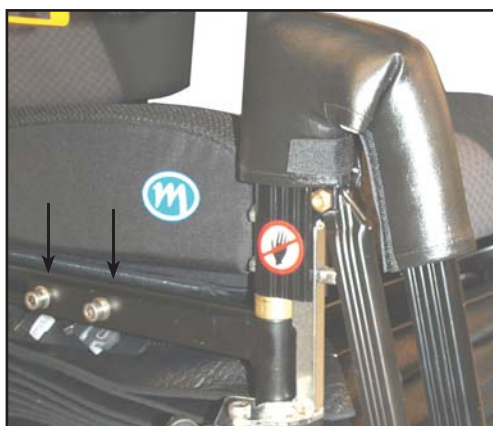

Fodstøtterne kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer.


HUSK at efterspænde skruerne ordentligt igen.



For at justere selve fodhvilerne op / ned skal kipspændet som vist løsnes, og fodhvilerne kan justeres.




For at justere selve fodstøtterne op / ned skal kipspændet som vist løsnes, og fodstøtterne kan justeres.

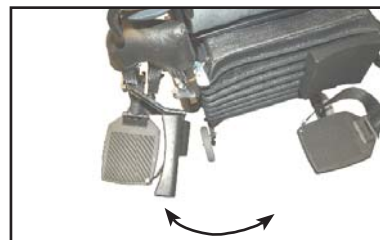

Fodstøtterne kan svinges til siden.

Dette gøres ved at trykke ind på det viste sted med fingeren. Og altså uden brug af værktøj.

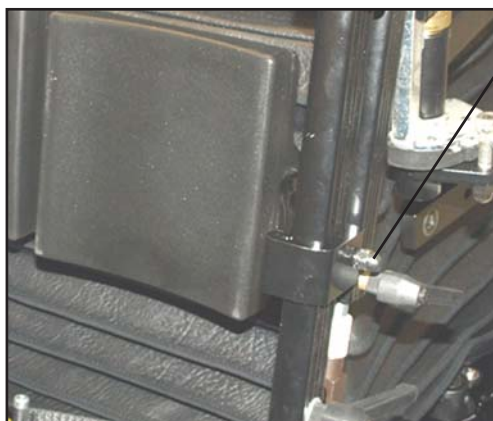

Lægstøtterne kan justeres trinløst op / ned. Det gøres ved at løsne skruen, flytte lægstøtten og spænde skruen igen.

Elektriske fodstøtter



Fodstøtterne kan justeres frem / tilbage. Dette gøres ved at løsne de 2 viste skruer.

HUSK at efterspænde skruerne igen.



Justering af højde og vinkel via joystick:

Skift til sædeindstilling med op/ned tasten.

Skift mellem de forskellige indstillinger med joystick højre/venstre eller Funktionstasten.



Når ikonet for det man ønsker at justere lyser, anvendes joystick op/ned til justering.

Hvis begge lyser med begge "benstøtter", kan man justere begge benstøtter på én gang.



Lægpudderne justeres ved at løsne denne skrue. Husk at efterspænde efter endt justering.




Tryk på dette udløserhåndtag og sving benstøtten til siden.

I denne position kan benstøtten løftes af.

Bemærk:


Der er ingen ledninger, der skal afmonteres.

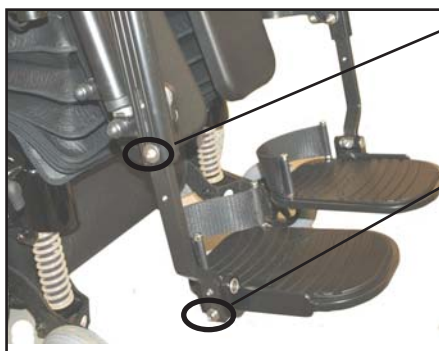

Højden kan justeres manuelt ved at løsne denne skrue, justere, spænde fast igen.

Vinklen på fodpladen justeres ved at løsne denne skrue, justere og spænde fast igen.

Introduktion til Ergo Lux

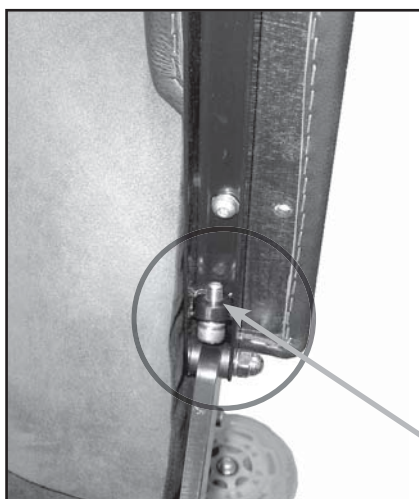

Armlæns-hældning

Justerskrue og låsemøtrik muliggør, at armlænets hældning kan justeres med ca. 15°.

Armlænet kan klappes helt op for at lette ind- og udstigning.


Justerskrue



Tilpasning af sædet

1. Tilpasning af armlæns-højden.
2. Tilpasning af armlæns-placering - frem / tilbage - 2 skruer.
3. Sædedybde-tilpasning, begge sider.

Justering af nakkestøtte

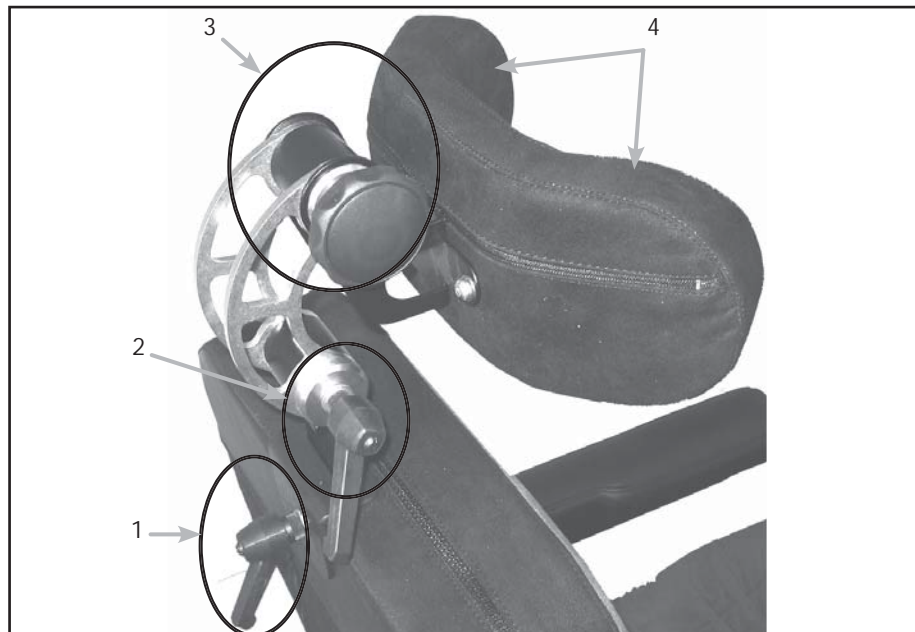

1. Højdejustering
2. Justering frem / tilbage
3. Vinkling af nakkestøtten
4. Justering af nakkestøtten



Swing away beslag



Udløserhåndtag

Jazzy kan være udstyret med et swing away beslag. For at betjene dette trykker man på udløserhåndtaget, og joysticken kan skubbes til siden.

Indstilling af Spinalus ryg

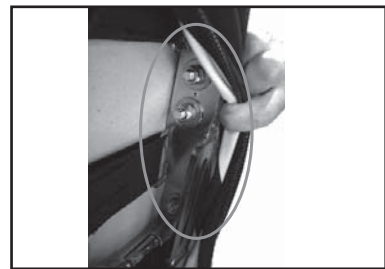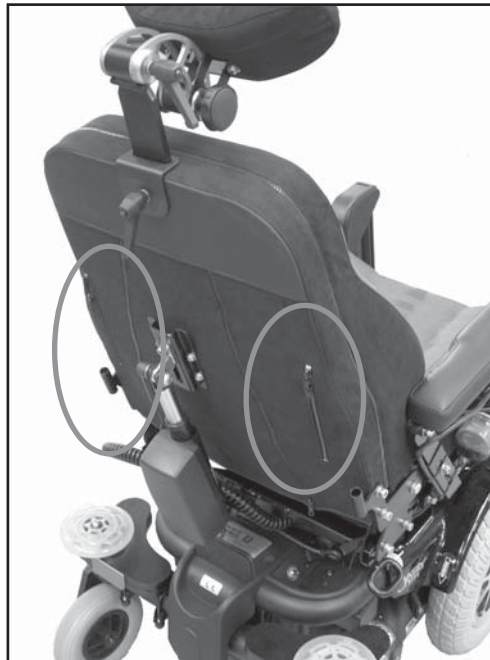

Nem adgang til justering gennem de 4 store lynlåse.



Lige bag lynlåsene ses justeringsmulighederne og de 4 skruer, der skal løsnes for at indstille ryggen form.

Alle bolte på Spinalus ryggen kan løsnes og indstilles til brugeren.

Fig. 1

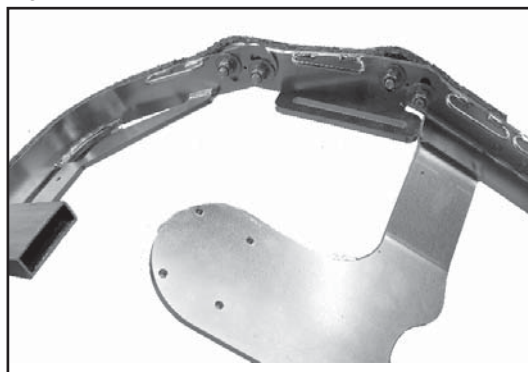


Fig. 1 og 2 viser Spinalus ryggen i yderpositioner.

Fig. 2



medemagruppen